

## CÔNG TY TNHH IKG VIHA

Địa chỉ trụ sở: Xóm Chùa, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Sản xuất tại: AN Medical Co., Ltd.

Địa chỉ nơi sản xuất: #103, 27 Dongmun-ro, Jeju-si, Jeju-do (Ildoil-dong, Dongmun Green Villa), Republic of Korea

Tên trang thiết bị y tế: **CHỈ KHÂU KHÔNG TIÊU**

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2024

### TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Xác nhận nội dung, bao bì mẫu đúng theo kích thước của sản phẩm.
2. Kiểm tra hạn sử dụng và đảm bảo bao bì sản phẩm không bị hư hại gì.
3. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng của sản phẩm
4. Xác định độ dài của kim, kiểm tra vị trí điều trị
5. Khử trùng bằng bông chứa cồn xung quanh các bộ phận dùng để đưa chỉ và kim tiêm vào.
6. Loại bỏ nắp của sản phẩm trong bao bì và sử dụng chỉ vô trùng cùng với kim tiêm cẩn thận.
7. Hãy chắc chắn được sử dụng bởi những nhân viên y tế có tay nghề cao
8. Đưa kim chính xác vào vùng da hoặc cơ cần điều trị.
9. Đẩy kim vào sao cho phần cuối cùng của sợi chỉ đã nằm hoàn toàn vào lớp biểu bì của vùng cần điều trị.
10. Không đưa vào quá hai phần ba của kim vào trong da.
11. Di chuyển kim lên xuống từ từ và nhẹ nhàng
12. Rút kim và dán miếng dán lên vùng vừa rút mũi kim ra.
13. Thái bỏ sản phẩm đã mở nắp nhưng chưa sử dụng hoặc đã hết hạn sử dụng.
14. Không tái sử dụng vì đây là thiết bị y tế sử dụng một lần.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

  
GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thị Ngọc Anh