



# TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên thiết bị: Giường bệnh nhân chạy điện

Mô hình: B-630S; B-630A; B-860A; B-640A; B-640S; B-850A; B-880AU; BH-930E; BE-985E; BE-988E; BE-988EW; BH-960KD

Hãng sản xuất: Sigma-Care Development Co., Ltd.

- Nước sản xuất: Đài Loan

## I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giường được sử dụng trong quá trình chăm sóc và điều trị bệnh nhân, có thể thiết kế sử dụng tại gia đình.

Điều chỉnh được 3 tư thế: nâng lưng, nâng chân, và lên/ xuống

Thân giường được làm từ thép không rỉ phủ sơn tĩnh điện.

Đầu giường và đuôi giường làm bằng nhựa ABS, có thể tháo rời.

Các tay vịn làm bằng nhựa ABS, nâng lên hạ xuống được

Điều chỉnh các tư thế bằng điều khiển bằng dây 12V DC

Nguồn điện sử dụng: 220-240VAC 50/60Hz

Bánh xe có đường kính 125 – 150mm, có phanh trung tâm.

Có 02 vị trí móc nước thải ở phía dưới giường.

### Thông số kỹ thuật:

Đầu giường và đuôi giường có thể tháo ráp dễ dàng

Phần lưng nâng đầu lên từ:  $0^{\circ} \sim 80^{\circ}$

Phần chân nâng lên:  $0^{\circ} \sim 40^{\circ}$

Tư thế Trendelenburn và Rew.Trend:  $\pm 11^{\circ}$

Có móc treo túi nước tiểu

Có lỗ cắm cọc truyền hai bên giường

Tải trọng của giường khoảng 250g

### Cấu hình cơ bản cho mỗi giường:

+ Cọc truyền: 01 cái

+ Đệm: 01 cái

+ Điều khiển: 01 cái

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh: 01 bộ

## II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### 1. Mục đích sử dụng:



Giường được sử dụng trong quá trình chăm sóc và điều trị bệnh nhân

## 2. Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Kết nối tủ với nguồn điện 220V

Bước 2: Ấn phía ON/ OFF trên bảng điều khiển để bật/ tắt giường.

Bước 3: Sau khoảng 5 giây đèn LED màu xanh hiện sáng trên bảng điều khiển thể hiện cho phép có thể điều khiển giường.

Bước 4: Điều chỉnh các tư thế của giường như: nâng đầu, lưng, chân, lên/ xuống bằng cách ấn các phím trên bảng điều khiển.

Bước 5: Kết thúc đưa giường về trạng thái cân bằng và ấn phím OF để tắt

## III. THÔNG TIN BẢO HÀNH

Tất cả các trường hợp hỏng hóc hoặc có vấn đề về kỹ thuật xin vui lòng liên hệ theo các thông tin sau:

1. Tên đơn vị bảo hành: Công ty Cổ phần HTP Việt Nam
2. Địa chỉ: G24, làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Hotline: 0919358160
4. Email liên hệ: [info.htpvn@gmail.com](mailto:info.htpvn@gmail.com)
5. Website: [www.htpvn.vn](http://www.htpvn.vn)

