

# Hướng dẫn sử dụng

## 1. Mô tả sản phẩm



STT	Tên thành phần	Thông số	Ghi chú
1	Khung sàn xe đẩy	Thép tấm không gỉ	Thép không gỉ
2	Khung chân di chuyển	Thép ống không gỉ	Thép không gỉ
3	Đệm bọc bao quanh thành xe đẩy	Đệm nhựa PVC	Bảo vệ chống va đập
4	Thanh chắn bảo vệ hai bên	Nút vận hành thanh chắn lên và xuống.	Thép không gỉ
5	Bánh xe	Bánh có khóa loại 6"	Chất lượng cao cấp
6	Đệm	Bề mặt chống thấm nước và Urethane T50mm	Chống thấm nước
7	Cọc truyền dịch	Thép không gỉ và 2 móc treo	Hai móc treo nhựa

## 2. Hướng dẫn vận hành

- Luôn giữ kiểm soát khóa chân khi sử dụng xe đẩy bệnh nhân (trong khi điều trị, ngủ, hoặc nghỉ ngơi)
- Giữ khóa đồng thời trên hai bánh cùng lúc.
- Khi cần di chuyển, nâng chốt khóa chân để mở khóa và đẩy xe theo hướng mong muốn.
- Phần thanh chắn bảo vệ hai bên sẽ tự động khóa khi nâng thanh chắn lên cao. Để hạ thanh chắn, ấn nút để mở khóa vị trí và hạ thanh chắn bảo vệ.

