

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AROMA FINE PLUS

-Mở gói bột, lấy bột cho vô chén vừa đủ theo nhu cầu.

-Pha trộn bột với nước theo tỷ lệ. Sau đó khuấy đều lên.

- Đặt hỗn hợp vào khay lấy dấu

- Tiếp đến là đặt khay vào miệng bệnh nhân

-Chờ khoảng ít phút cho bột định hình và tháo khay ra khỏi miệng bệnh nhân

-Rửa khay dưới vòi nước chảy cho sạch.

- Sau cùng gửi khay dấu này đến phòng chế tạo răng giả

