

# BONYPLUS®

## Superior



**Fix&GO**  
SMILE WITH CONFIDENCE

### Vật liệu gắn hàm giả

✓ Không chứa kẽm ✓ Dễ sử dụng ✓ Độ bám dính cao



## Hướng dẫn sử dụng

Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng.

1. Trước khi sử dụng, hãy làm sạch hàm răng giả như thường lệ.
2. Tháo miếng dán kim loại dùng chống ẩm & giữ vệ sinh ra khỏi đầu tuýp.
3. Làm ẩm hàm răng giả và bôi vật liệu như hình minh họa kế bên.
4. Trước khi đặt hàm răng giả vào miệng, hớp một ngụm nước để làm ẩm nướu và niêm mạc miệng. Điều này đặc biệt cần thiết đối với các bệnh nhân bị chứng khô miệng vì vật liệu này được kích hoạt bởi độ ẩm hoặc nước bọt.
5. Đặt hàm răng giả vào miệng và giữ đúng vị trí bằng cách ấn nhẹ xuống trong vài giây.
6. Chờ 5 phút trước khi ăn hoặc uống.



**HÀM TRÊN**



**HÀM DƯỚI**

**Lưu ý:** Nếu khó nặn vật liệu ra khỏi tuýp, hãy đặt tuýp vào cốc nước ấm (tối đa 50°C) trong một thời gian ngắn, đảm bảo rằng nắp tuýp không bị nhúng nước. Nếu phần đầu tuýp bị tắc, hãy sử dụng dụng cụ sạch để thông. Hãy giữ đầu bơm của tuýp khô ráo và không dính vật liệu thừa để tránh bị tắc.

**THẬN TRỌNG:** Không sử dụng nếu mở hộp mới mà đầu bơm của tuýp đã mất miếng dán kim loại. Sử dụng vật liệu theo tờ hướng dẫn sử dụng này. Để vật liệu này tránh xa tầm tay trẻ em. Không sử dụng nếu người dùng mắc cảm hoặc dị ứng với một trong các thành phần của vật liệu. Nếu người dùng đang sử dụng dược phẩm có ảnh hưởng đến nướu răng hoặc khoang miệng, hãy tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi sử dụng vật liệu này. Trong trường hợp nướu răng bị kích ứng hoặc đau nhức, hãy ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến chuyên môn nếu cần thiết. Triệu chứng đau và khó chịu của nướu răng cũng có thể gây ra bởi hàm răng giả không khớp hoặc bị nứt vỡ, do đó điều quan trọng là cần tham khảo ý kiến chuyên môn thường xuyên. Nên bảo quản vật liệu nơi khô ráo và ở nhiệt độ phòng.

**THÀNH PHẦN:** Cellulose Gum, Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Silica, Menthol, Menthyl Lactate, Lecithin.

#### Nhà sản xuất:

Bony AG  
Heiligkreuz 16  
FL-9490 Vaduz  
Liechtenstein – EUROPE  
[www.bonyf.com](http://www.bonyf.com)

#### Nhà phân phối:

LPN DEMETECH CO., LTD  
19/7 Hung Vuong  
Ward 4, District 5  
Hochiminh City  
Viet Nam

#### MADE IN SWITZERLAND

5.740.00.D.0.0.86 - R24082016D:PT