

Hướng dẫn sử dụng OLIVAFIX

- Độ an toàn cao và tác dụng được cải tiến
- Không chứa hóa chất gốc Hydrocarbon.
- Thời gian lưu giữ đến 24h
- Độ lưu giữ ổn định

Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng.

1. Trước khi sử dụng, hãy làm sạch hàm răng giả như thường lệ.
2. Tháo miếng dán kim loại dùng chống ăm & giữ vệ sinh ra khỏi đầu tuýp.
3. Làm ăm hàm răng giả và bôi vật liệu như hình minh họa kể bên.
4. Trước khi đặt hàm răng giả vào miệng, hóp một ngụm nước để làm ăm nướu và niêm mạc miệng. Điều này đặc biệt cần thiết đối với các bệnh nhân bị chứng khô miệng vì vật liệu này được kích hoạt bởi độ ăm hoặc nước bọt.
5. Đặt hàm răng giả vào miệng và giữ đúng vị trí bằng cách ấn nhẹ xuống trong vài giây.
6. Chờ 5 phút trước khi ăn hoặc uống.



HÀM TRÊN



HÀM DƯỚI

Lưu ý: Nếu khó nặn vật liệu ra khỏi tuýp, hãy đặt tuýp vào cốc nước ăm (tối đa 50°C) trong một thời gian ngắn, đảm bảo rằng nắp tuýp không bị nhúng nước. Nếu phần đầu tuýp bị tắc, hãy sử dụng dụng cụ sạch để thông. Hãy giữ đầu bơm của tuýp khô ráo và không dính vật liệu thừa để tránh bị tắc.

THẬN TRỌNG: Không sử dụng nếu mở hộp mới mà đầu bơm của tuýp đã mất miếng dán kim loại. Sử dụng vật liệu theo tờ hướng dẫn sử dụng này. Để vật liệu này tránh xa tầm tay trẻ em. Không sử dụng nếu người dùng mắc cảm hoặc dị ứng với một trong các thành phần của vật liệu. Nếu người dùng đang sử dụng dược phẩm có ảnh hưởng đến nướu răng hoặc khoang miệng, hãy tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi sử dụng vật liệu này. Trong trường hợp nướu răng bị kích ứng hoặc đau nhức, hãy ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến chuyên môn nếu cần thiết. Triệu chứng đau và khó chịu của nướu răng cũng có thể gây ra bởi hàm răng giả không khớp hoặc bị nứt vỡ, do đó điều quan trọng là cần tham khảo ý kiến chuyên môn thường xuyên. Nên bảo quản vật liệu nơi khô ráo và ở nhiệt độ phòng.

THÀNH PHẦN: Cellulose Gum, Olea Europaea (Olive Fruit) Oil, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Hydrogenated Soybean Oil, Trihydroxystearin, Silica, Menthol, Lecithin, Citrus Limon Peel Oil, Menthyl Lactate

Nhà sản xuất:
Bony AG
Heiligkreuz 16
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein – EUROPE
www.bonyf.com

Nhà phân phối:
LPN DEMETECH CO., LTD
19/7 Hung Vuong
Ward 4, District 5
Hochiminh City
Viet Nam

MADE IN SWITZERLAND
5.740.00.D.0.0.86 - R24082016D:PT