

# TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ ĐÔNG PHA

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<b>Băng gạc y tế</b>
1.2	Danh mục thành phần	<b>Gạc y tế</b> có tác dụng cực tốt trong việc tẩy và sát trùng vùng vết thương bị viêm nhiễm... - Sợi 100% cotton tự nhiên - Thiết kế mềm mại và tinh khiết - Được sản xuất tại Việt Nam với dây chuyền công nghệ khép kín.
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	- Miếng gạc được dùng dự phòng nhiễm khuẩn trong các tổn thương một phần và toàn bộ lớp da do chấn thương, bỏng độ 1 và độ 2 ( bỏng bô, bỏng nước sôi...), các vết loét, vùng cho da, ghép da, các vết mổ.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	- Rửa sạch vết thương, vết bỏng bằng dung dịch rửa vô trùng, nước muối 0,9%, dung dịch povidon iodine 1%, dung dịch berberin 0,1%. - Thấm khô vết thương bằng bông hút vô trùng. - Bôi một lớp kem thuốc lên bề mặt vết thương, tùy theo giai đoạn của vết thương mà có chỉ định phù hợp. - Đặt một miếng gạc thuốc, gạc vaselin, gạc berberin 1%, gạc povidon iodine 10%, gạc sulfadiazin bạc..., lên bề mặt vết thương. Kích cỡ miếng gạc rộng hơn miệng vết thương khoảng 1-2cm. Những loại gạc thuốc này có tính sơ nước nên có khả năng bóc tách dễ dàng ra khỏi bề mặt vết thương, giúp làm giảm thiểu sự đau đớn cho người bệnh khi thay băng. - Đặt khoảng 4-5 lớp gạc hút bao phủ ra bên ngoài miếng gạc thuốc. Sau đó dùng băng cuộn hoặc băng dính để băng vết thương lại.
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Chỉ nên sử dụng 1 lần

1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không sử dụng sản phẩm có bao bì hở vì không đảm bảo độ thanh trùng và chất lượng của sản phẩm.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	<p>Thông tin về tính an toàn / vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế</p> <p><b>PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN:</b></p> <p>Bảo quản trong thùng đóng kín ở nhiệt độ phòng và tránh ánh sáng trực tiếp.</p> <p><b>LƯU Ý KHI SỬ DỤNG:</b></p> <p>(1) Kiểm tra kỹ hạn sử dụng trước khi mở bao bì, sử dụng ngay sau khi mở bao bì.</p> <p>(2) Không sử dụng sản phẩm đã bị mở bao bì đóng gói.</p>	