



## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BĂNG GẠC Y TẾ**

- Mục đích/Chỉ định sử dụng:
  - Miếng gạc được dùng dự phòng nhiễm khuẩn trong các tổn thương một phần và toàn bộ lớp da do chấn thương, bỏng độ 1 và độ 2 ( bỏng bô, bỏng nước sôi...), các vết loét, vùng cho da, ghép da, các vết mổ.
- Hướng dẫn sử dụng:
  - Rửa sạch vết thương, vết bỏng bằng dung dịch rửa vô trùng, nước muối 0,9%, dung dịch povidon iodine 1%, dung dịch berberin 0,1%.
  - Thấm khô vết thương bằng bông hút vô trùng.
  - Bôi một lớp kem thuốc lên bề mặt vết thương, tùy theo giai đoạn của vết thương mà có chỉ định phù hợp.
  - Đặt một miếng gạc thuốc, gạc vaselin, gạc berberin 1%, gạc povidon iodine 10%, gạc sulfadiazin bạc..., lên bề mặt vết thương. Kích cỡ miếng gạc rộng hơn miệng vết thương khoảng 1-2cm. Những loại gạc thuốc này có tính sơ nước nên có khả năng bóc tách dễ dàng ra khỏi bề mặt vết thương, giúp làm giảm thiểu sự đau đớn cho người bệnh khi thay băng.
  - Đặt khoảng 4-5 lớp gạc hút bao phủ ra bên ngoài miếng gạc thuốc. Sau đó dùng băng cuộn hoặc băng dính để băng vết thương lại.
- Cảnh báo và thân trong:
  - Chỉ nên sử dụng 1 lần
- Tác dụng bất lợi có thể xảy ra:
  - Không sử dụng sản phẩm có bao bì hở vì không đảm bảo độ thanh trùng và chất lượng của sản phẩm.