

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam (Địa chỉ: Lottery Tower, Tầng 12A, Lầu 12A-01, 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP.HCM)

Ngày 20 tháng 11 năm 2017

Tên sản phẩm: TỦ ĐỰNG THUỐC DÙNG TRONG Y TẾ - Medication Cabinet Key Lock with 8 shelves 405 (Model: MC2M-600KTY6405-WE & MC2M-915TY9405-WE)

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<i>Tủ đựng thuốc có thể khóa được gắn với khay kéo ra. Các kệ được trang bị mặt kệ và tấm ngăn sản phẩm bằng nhựa.</i>
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	<ul style="list-style-type: none">- Tủ- Cửa- Kệ- Tấm ngăn
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	<i>Tủ thuốc được sử dụng để bảo quản thuốc an toàn hiệu quả và chính xác.</i>
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<p><i>Đảm bảo ngăn tủ được lắp vuông góc tên cơ sở vững chắc</i></p> <p><i>Tủ có thể được cố định vào một bức tường bằng cách sử dụng giá đỡ kèm theo</i></p> <p><i>Lắp đặt kệ theo yêu cầu về góc kệ và khoảng cách</i></p> <p><i>Đảm bảo các kệ khóa kệ được đẩy vào trong khi lắp đặt và kéo ra ngoài nếu kệ để được tháo ra</i></p> <p><i>Lắp hai mặt tiền kệ ở kênh trước giá</i></p> <p><i>Cài đặt dải dữ liệu góc cố định ở cuối dãy giá để giúp xác định chính xác sản phẩm</i></p> <p><i>Sử dụng ngăn cách sản phẩm khoảng cách kệ riêng biệt để đáp ứng yêu cầu lưu trữ</i></p> <p><i>Cơ chế kéo ra để cho phép thả sau và đầu tiên trong quản lý sản phẩm cho mỗi kệ được kích hoạt bằng cách nhấn lên trên miếng đệm</i></p> <p><i>Để rút lại kệ, đẩy nhẹ nhàng về phía sau cho đến khi nó khóa</i></p> <p><i>Trước khi mở rộng hoặc rút lại kệ phải đảm bảo cửa tủ được mở hoàn toàn.</i></p> <p><i>Đảm bảo việc tiếp cận tủ đựng thuốc được quản lý phù hợp với chính</i></p>



		<p><i>sách quy định</i></p> <p><i>Tất cả các sản phẩm phải được làm sạch bằng chất tẩy trùng hòa tan. Đảm bảo các bề mặt được lau khô bằng khăn giấy hoặc dụng cụ không có vải. Không được bảo dưỡng đường chạy.</i></p>
1.5	Chống chỉ định	<i>Không có chống chỉ định cho sản phẩm này.</i>
1.6	Cảnh báo và thận trọng	<p><i>Khi lắp đặt, các giá được sơn tĩnh điện và tủ sơn bột phải được san phẳng và thẳng đứng và được định vị trên sàn nhà rắn.</i></p> <p><i>Tải trọng làm việc an toàn cho lắp đặt với 8 kệ là 300 kg.</i></p> <p><i>Tải trọng cân phân bố cân bằng tối đa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kéo ngăn kéo (ngang) 20kg</i> • <i>Kéo ngăn kéo (vị trí góc cạnh) 8kg</i> <p><i>Để đảm bảo an toàn, tủ có thể được gắn vào tường bằng một khung gắn với một điểm neo phù hợp mạnh.</i></p>
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	<i>Không có tác dụng bất lợi có thể xảy ra.</i>
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Úc	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác: Các sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện và nhà thuốc ở Úc	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	<i>Không có báo cáo nào về sự cố khi sử dụng các sản phẩm này.</i>



Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Giám Đốc Điều hành



Nguyễn Quốc Tuấn