



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ DÙNG THUỐC DÙNG TRONG Y TẾ

Model: MC2M-600KTY6405-WE

MC2M-915TY9405-WE

Thiết bị: Medication Cabinet Key Lock 2M600 with 8 shelves 405

Medication Cabinet Key Lock 2M915 with 8 shelves 405

Các bước sử dụng:

Đảm bảo ngăn tủ được lắp vuông góc tên cơ sở vững chắc

Tủ có thể được cố định vào một bức tường bằng cách sử dụng giá đỡ kèm theo

Lắp đặt kệ theo yêu cầu về góc kệ và khoảng cách

Đảm bảo các kẹp khóa kệ được đẩy vào trong khi lắp đặt và kéo ra ngoài nếu kệ để được tháo ra

Lắp hai mặt tiền kệ ở kênh trước giá

Cài đặt dải đỡ liệu góc cố định ở cuối dãy giá để giúp xác định chính xác sản phẩm

Sử dụng ngăn cách sản phẩm khoảng cách kệ riêng biệt để đáp ứng yêu cầu lưu trữ

Cơ chế kéo ra để cho phép thả sau và đầu tiên trong quản lý sản phẩm cho mỗi kệ được kích hoạt bằng cách nhấn lên trên miếng đệm

Để rút lại kệ, đẩy nhẹ nhàng về phía sau cho đến khi nó khóa

Trước khi mở rộng hoặc rút lại kệ phải đảm bảo cửa tủ được mở hoàn toàn.

Đảm bảo việc tiếp cận tủ được thuốc được quản lý phù hợp với chính sách quy định

Tất cả các sản phẩm phải được làm sạch bằng chất tẩy trùng hòa tan. Đảm bảo các bề mặt được lau khô bằng khăn giấy hoặc dụng cụ không có vải. Không được bảo dưỡng đường chạy.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

CÔNG GIAM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
IDS MEDICAL SYSTEMS
VIỆT NAM



Nguyễn Quốc Tuấn