



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Băng dính vết thương dạng cuộn không tẩm thuốc Alpheta (kích thước 5m x 1,25cm; 5m x 2,5cm; 5m x 5cm)

- Dán băng lụa vào vùng da khô và sạch
- Tránh vùng da bị tổn thương, không kéo dẫn da khi dán băng lụa
- Để đảm bảo các cạnh băng dính tốt vào da. Vuốt nhẹ trên cạnh băng.
- Phải tháo băng theo chiều của lỗ chân lông trên da, song song với mặt da, 1 tay giữ da và 1 tay từ từ bóc băng.