



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Drainage Bag

- **Mô tả dụng cụ:** Dùng để chứa dịch dẫn lưu, gồm 01 túi, 01 dây nối có khóa vặn.
- **Chỉ định:** Được dùng để chứa dịch dẫn lưu qua da các ổ absces dịch mật, thận, niệu quản, khoang màng phổi, absces phổi và vùng trung thất.
- **Trước khi sử dụng:** Túi dẫn lưu được đóng gói vô trùng. Trước khi sử dụng phải kiểm tra bao vô trùng và dụng cụ còn nguyên hay không. Nếu rách bao vô trùng → KHÔNG SỬ DỤNG. Ngay lập tức trả lại cho Bioteque để đổi.

#### **THẬN TRỌNG:**

- Theo luật FDA USA.
- Sử dụng 1 lần.
- Đọc hướng dẫn sử dụng THẬN TRỌNG trước khi dùng Catheter. Đặc biệt mục LƯU Ý và THẬN TRỌNG.
- Nếu có gì bất thường phải ngưng ngay lập tức, có hoạt động xử trí thích hợp.
- Không đặt sử dụng liên tục 30 ngày.
- Sản phẩm có thời hạn sử dụng tốt nhất/3 năm khi bảo quản thích hợp.
- Bảo quản ở nơi mát, khô ráo. Không tiếp xúc với các chất vô cơ, phóng xạ ion hóa hoặc tia tử ngoại.
- Theo dõi kho dự trữ để sử dụng Catheter thích hợp/hạn dùng.
- Thao tác sản phẩm nhẹ nhàng, tránh dùng lực kéo quá mức...
- Sử dụng sản phẩm ngay khi bóc bao vô trùng. Sản phẩm sau khi sử dụng bỏ ở nơi an toàn.

#### **CHÔNG CHỈ ĐỊNH:**

- Chỉ người được huấn luyện thành thạo kỹ thuật mới được sử dụng sản phẩm.

#### **CÁC BIẾN CHỨNG**

- Tắc dây nối

Cách làm:

Được nối trực tiếp với ống dẫn lưu bằng cách kết nối khóa ở đầu túi với ống dẫn lưu để dịch tiết ra rừ từ