

DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Sison

Viêm mũi bốn mùa

Thành phần:

- Natri clorid
- Tinh dầu Đại bi (Borneol).

Tính chất:

- Natri clorid giúp phục hồi độ ẩm tự nhiên cho mũi, tạo cảm giác sáng khoái, dễ chịu, loại bỏ gỉ mũi, chất nhầy giúp ngăn ngừa nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi dị ứng...

- Tinh dầu Đại bi dùng làm thuốc đượ ghi đầu tiên trong sách Tân tu bản thảo. Theo y học cổ truyền có tác dụng phát tán phong hàn (chữa chứng cảm mạo do lạnh, dị ứng thời tiết), khai khiếu (giúp thông mũi, ngăn ngừa các bệnh về mũi), tích uế chỉ thống (làm tinh thần, thải chất độc, giảm đau), tiêu đờm, sát trùng, kháng khuẩn, kháng viêm, săn se niêm mạc.

- **Sison viêm mũi bốn mùa** dùng an toàn ngay cả khi sử dụng liên tục trong thời gian dài mà không bị phụ thuộc vào sản phẩm.

Công dụng Sison viêm mũi bốn mùa:

- Giúp ngăn ngừa nghẹt mũi, viêm mũi, viêm xoang, viêm mũi dị ứng.

- Giúp tăng cường kháng khuẩn, kháng viêm, thông mũi.

- Hỗ trợ điều trị các triệu chứng viêm mũi, viêm xoang.

- **Sison viêm mũi bốn mùa** dạng xịt phun sương tạo các hạt mịn bao phủ bề mặt niêm mạc, dễ dàng đi sâu rộng vào khoang mũi, giúp loại bỏ gỉ mũi, chất nhầy, giúp mũi thông thoáng, dễ thở hết mệt mỏi và khó chịu.

Cách dùng Sison viêm mũi bốn mùa:

- Dùng cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên, người lớn, phụ nữ có thai và cho con bú.

- Trẻ em từ 2-6 tuổi: xịt 1 - 2 lần/ngày.

- Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: xịt 2-3 lần/ngày.

- Người lớn, trẻ em trên 12 tuổi: xịt 4 - 5 lần/ngày.

- Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng

- Đặt ngón trỏ lên đầu vòi phun

- Đưa nhẹ nhàng vòi phun vào lỗ mũi

- Ấn nhanh đầu phun từ 1 đến 2 lần mỗi bên mũi

- Lau sạch, khô vòi phun, đậy nắp bảo vệ.

Chú ý: Không được dùng khi có bất cứ mẫn cảm nào với một trong các thành phần của sản phẩm.

Đóng gói: Chai 70 ml dạng xịt phun sương

Bảo quản: trong bao gói kín, nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ NSX. Ngày sản xuất ghi trên nhãn.

Số lưu hành trang thiết bị y tế

Sản phẩm được phân phối bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ROSIX

Đc: Số 121 phố Đại An, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

ĐT: 024-35747076 * Fax: 024-35747077

Website: <http://rosix.com.vn>

Sản xuất bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA**

Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ sản xuất: **Nhà máy Dược phẩm DKPHARMA**

Chi nhánh Bắc Ninh - Công ty Cổ phần Dược KHOA
Lô III-1.3, đường D3, Khu Công nghiệp Quế Võ II, Quế Võ, Bắc Ninh.