

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**ĐAI, NẸP CHỈNH HÌNH, CỐ ĐỊNH VẾT GẦY TYNOR**

**Mô tả**

- Đai, nẹp chỉnh hình, cố định vết gãy là các sản phẩm được sử dụng bên ngoài cơ thể, không cấy ghép bên trong, để hỗ trợ điều trị, cố định các bộ phận cơ thể bị thương với nhiều kích cỡ chọn lựa phù hợp với từng vị trí điều trị trên cơ thể từng bệnh nhân: các bộ phận của tay, cánh tay, các bộ phận của chân, vùng cổ, vùng lưng, bàn chân, bàn tay ...
- Có nhiều kích cỡ để lựa chọn phù hợp với nơi cần hỗ trợ điều trị như AD, CH, S, M, L, XL, XXL, XXXL, UNI, SPL, SN, SW, MN, MW, LN, LW, XLN, XLW ...

**Ứng dụng**

- Bong gân, viêm gân.
- Bảo vệ và phục hồi sau phẫu thuật.
- Phù nề.
- Viêm khớp, trật khớp.
- Thoái hóa cột sống, đốt sống cổ.
- Cố định các vết vẩy.
- ....

**Sử dụng**

- Sử dụng theo chỉ định của bác sĩ.
- Chọn kích cỡ phù hợp với vị trí cần hỗ trợ, có các kích thước như AD, CH, S, M, L, XL, XXL, XXXL, UNI, SPL, SN, SW, MN, MW, LN, LW, XLN, XLW,...
- Ngừng sử dụng trong các trường hợp sau:
  - Suy giảm cảm giác
  - Dị ứng, ngứa
  - Lưu thông máu suy giảm
  - Con đau tăng lên hoặc cứ đau dai dẳng.
- Hỏi ý kiến bác sĩ nếu sử dụng đồng thời với các thiết bị y tế khác.
- Sử dụng sai hoặc sử dụng không đúng có thể dẫn đến tác dụng phụ và làm giảm hiệu quả
- Để xa tầm tay trẻ em
- Sử dụng theo hướng dẫn được in trên vỏ hộp



**Lưu Thanh Tâm**