

# Flowseal™

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XE VẬN CHUYỂN DỊCH TRUYỀN DÙNG TRONG Y TẾ

Model: PY859

Thiết bị: POWERLIFT TROLLEY

Các bước sử dụng:

Vị trí của nền được điều khiển bằng công tắc rocker nằm trên đỉnh hộp pin. Xe đẩy có thể được nâng lên bằng cách nhấn vào phần trên cùng của công tắc hoặc hạ xuống bằng cách nhấn vào phần dưới cùng của công tắc.

Phanh nằm trên một trong những bánh xe sau của xe đẩy. Nó ngăn cản bánh xe lăn từ cả hai xoay và lăn. Nhấn cần bạc đặt trên bánh xe lăn để hãm phanh.

Khóa định hướng ngăn bánh xe lăn xoay nhưng cho phép bánh xe xoay như thường lệ. Sử dụng khi đẩy xe đẩy theo một đường thẳng để tạo sự ổn định lớn hơn. Bộ phận khóa bánh có hướng có một đôn màu đen hoặc màu xanh lá và nằm ở góc phải phía trước của xe đẩy.

*Người đại diện hợp pháp của cơ sở*

*Giám Đốc Điều hành*



*Nguyễn Quốc Tuấn*