


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐÈN KHÁM

MODEL: MARLED E3

HÃNG SẢN XUẤT: KLS MARTIN/ĐỨC

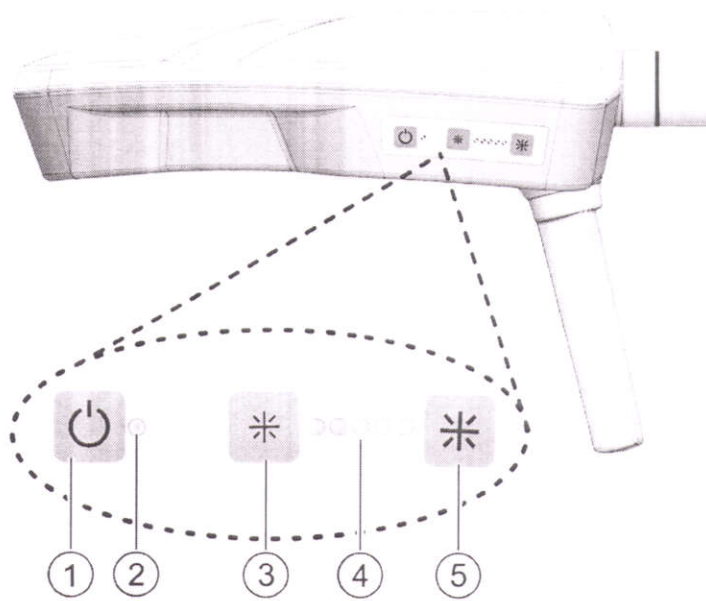


1. Điều khiển

- Nút 1 để bật nguồn
- Đèn chỉ báo (2):
 - Màu xanh: đèn sẵn sàng sử dụng
 - Màu đỏ: Đèn có vấn đề
- Nút 3: điều chỉnh độ sáng: tăng cường độ sáng
- Nút 5: điều chỉnh độ sáng: giảm cường độ sáng
- Đèn chỉ báo 4: cho biết mức cường độ sáng

2. Vận hành

- Cắm nguồn
- Bật công tắc
- Chọn độ sáng phù hợp

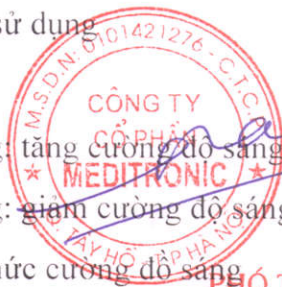

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Ngọc Thạch

- Dùng tay nắm đèn để điều chỉnh vị trí thích hợp mang lại trường sáng tối ưu

3. Xử lý lỗi

Triệu chứng	Nguyên nhân	Cách giải quyết
Đèn không sáng	Tiếp xúc kém	Tắt và bật lại nguồn
Đèn không sáng	Không có điện áp nguồn	Kiểm tra lại điện áp và các đầu nối
Đèn không sáng	Module đèn LED bị hỏng	Liên lạc với kỹ thuật
Đèn không giữ nguyên vị trí	Lực ma sát giữa các khớp	Chỉnh lại khớp chân đèn

