

TÀI LIỆU MÔ TẢ KỸ THUẬT MÁY SẮC THUỐC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

ĐC: THÔN KHẢ TIÊN- XÃ DUYÊN HẢI-HUNG HÀ- THÁI BÌNH

PGD: SỐ 5 TT6.2 KĐT MỚI AO SÀO -THỊNH LIỆT-HOÀNG MAI-HÀ NỘI

Ngày.....tháng.....năm.....

STT	ĐỀ MỤC	NỘI DUNG MÔ TẢ
1	Máy sắc thuốc	
1.1	Mô tả chung	-Model: ST-16, ST-18, ST-24, ST-32 -Hãng SX: công ty TNHH Sản xuất thiết bị y tế Việt Nam -Nước SX: Việt Nam -Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001-2015 -Chất lượng: Hàng mới 100% - Máy sắc thuốc được sản xuất bằng inox, sắc một lần 16,18,24,32 thang thuốc khác nhau (tùy model). giảm thời gian và công sức trong quá trình sắc cho bệnh nhân. Thiết bị này đặc biệt phù hợp với các bệnh viện y học cổ truyền , khoa y học cổ truyền của các bệnh viện đa khoa hay các phòng khám y học cổ truyền đáp ứng nhu cầu sắc thuốc hàng ngày cho bệnh nhân. -Nguyên lý hoạt động: Máy sắc thuốc theo nguyên lý dùng dầu truyền nhiệt để đun thuốc , thanh sợi đốt không tiếp xúc trực tiếp với thuốc, nhiệt độ sôi cài đặt được. Vì vậy chất lượng thuốc đảm bảo không bị cháy -Công suất thiết kế: Sắc một lần 16,18,24,32 thang thuốc (tùy model) -Nguồn điện cung cấp: 220v/50HZ
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	-Giỏ sắc thuốc inox có nắp đậy: 16,18,24,32 bộ tùy model -Khung máy bằng inox chuyên dụng: 01 bộ -Vòi nước: 16,18,24,32 bộ tùy model - Bộ cảm biến nhiệt độ và đèn báo tích hợp : 01bộ - Nguồn điện và công tắc: 01 bộ
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	- Dùng sắc thuốc trong các cơ sở đông y
1.4	Hướng dẫn sử dụng	- Đặt thuốc vào các giỏ, cho nước, bật nguồn điện.Hệ thống tự ngắt sau khi hoàn thành sắc thuốc. Lấy thuốc đầu ra từ vòi.
1.5	Chống chỉ định	Không
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Kiểm tra và đảm bảo nguồn nước luôn được cung cấp vào thiết bị, nên ngắt điện khi không sử dụng.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	An toàn với người sử dụng
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	Không
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	Không
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	Thiết bị chưa gặp phải sự cố hay bất lợi gì bị phản ánh. Thiết bị được bảo hành tận nơi lắp đặt trong thời gian 01 năm.

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Việt