

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SẮC THUỐC



Bước 1:

- Kiểm tra mức nước trong bình sinh hơi bằng cách mở cánh tủ ra quan sát mức nước trong ống thủy nếu dưới mức thấp phải bổ sung nước
- Bổ sung nước bằng cách Mở van cấp nước Rồi đổ nước vào phễu cấp nước

Bước 2:

Cho thuốc vào bình sắc và đổ nước ngập thuốc

Bước 3:

- Bật cầu dao điện cấp nguồn cho máy
- Đặt nhiệt độ cho bình sắc thông thường để 100°c
- Đặt thời gian sắc thuốc (thời gian sẽ bắt đầu tính giờ từ lúc thuốc trong bình sắc sôi) thông thường đặt 2 giờ
- Nhấn nút Bật để chạy máy

Chú ý :

- Khi bắt đầu chạy máy phải mở van xả áp suất đến khi có hơi nước ra thì đóng lại, điều này nhằm cho thuốc ở tất cả các bếp sôi đều
- Máy có chế độ báo cạn tự động và không cho chạy khi nước trong bình sinh hơi cạn dưới mức thấp
- Máy sẽ dừng khi thời gian sắc hết và còi báo sẽ kêu