

TP.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY IN PHIM X-QUANG Y TẾ VÀ PHỤ KIỆN
Model: Drystar AXYS
Hãng sản xuất: Agfa (Wuxi) Imaging Co. Ltd. / Trung Quốc; Agfa-Gevaert HealthCare GmbH / Đức.

-----o0o-----

1. Các bộ phận chính :

- 1: Nút tắt/mở nguồn
- 2: Màn hình LCD
- 3: Các phím điều khiển
- 4: Đèn báo
- 5: khay phim
- 6: Bộ phận đỡ phim ra

2. Khởi động máy in



Nhấn nút để khởi động

Màn hình hiển thị quá trình self test

Tiếp theo là giai đoạn làm nóng đầu nhiệt :

Hoàn tất quá trình khởi động màn hình LCD sẽ hiển thị :

3.Tắt máy :



Nhấn nút để tắt máy in

Màn hình LCD sẽ hiển thị

4. Cách thay phim

Khi hết phim đèn báo sẽ nhấp nháy màu đỏ kèm theo thông báo “ UPPER INPUT TRAY EMPTY” hoặc “ LOWER INPUT TRAY EMPTY”

- Kéo khay phim ra
- Lấy phim từ hộp :

Bỏ phim theo đúng chiều và đóng khay phim lại .