



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN MÔ DI ĐỘNG 700E LED

1. **Khi cắm điện vào sử dụng** (Đèn báo màu xanh nhạt sáng, chỉ ra rằng thiết bị đã có điện). Rút phích cắm điện sau khi sử dụng. Thiết bị được nghỉ làm việc khi rút phích điện. Việc bật và tắt đèn được điều khiển bằng một nút bật tắt. Khi đèn được bật, ánh sáng sẽ sáng lên từ từ. Theo nhu yếu cầu của người sử dụng, ấn nút tăng độ sáng hoặc nút giảm độ sáng để điều chỉnh độ sáng của đèn mô.  
2. Cắm vào tay nắm của đèn để di chuyển đầu đèn lên và xuống và xoay đầu đèn sang trái và phải.  
3. Tay nắm khử khuẩn có thể được xoay để điều chỉnh độ hội tụ của đèn  
4. Tay cầm điều chỉnh ánh sáng có thể được sử dụng để điều chỉnh độ sáng và khoảng tối của ánh sáng.  
5. Khi có lỗi trong bóng đèn chính, bảng mạch điện tử trong đầu đèn sẽ tự động chuyển mạch của bóng đèn chính sang mạch của bóng đèn bổ sung và bật bóng đèn phụ, trong khi đó đèn báo báo động của bóng đèn chính sẽ sáng để báo động. Sau một thời gian phẫu thuật, nên kiểm tra thay thế bóng đèn đã quá lâu theo thời gian.  
6. Thiết bị được nghỉ làm việc khi rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện.

Sản phẩm của: **SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT Co., Ltd**

No.7753, Chuannanfeng Highroad, Datuan Town, Pudong New District 201311  
Shanghai, China

*Nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam:*

Tên công ty : **Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị Y tế Tuấn Ngọc**  
Địa chỉ : Số 36, Ngõ 181, Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội  
Mã số thuế : 0107476867

Số điện thoại : 024 32247954

Số fax :

Email : [tuanngocttsme.jsc@gmail.com](mailto:tuanngocttsme.jsc@gmail.com)

**Tư vấn khách hàng:** Tel: 024 32247954 - Mobile: 0985622996 - 01278813888