



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

# ĐÈN MÔ TREO TRẦN HAI NHÁNH ZF 700/500 LED

### 1. Điều chỉnh vị trí đèn

Khi sử dụng, bật nguồn trên tay đèn, nó sẽ từ từ sáng đèn với một thời gian trễ nhất định. Lấy tay cầm vào tay nắm của đèn để di chuyển lên trên, xuống dưới và xoay quanh trục đèn. Cầm núm điều khiển vô trùng, đẩy nghiêng bên phải và bên trái (lên đến khoảng 200°). Cuối cùng, đèn được điều chỉnh theo ý của bạn.

### 2. Xoay tay cầm vô trùng, để điều chỉnh ánh sáng hội tụ theo yêu cầu.

### 3. Công tắc điều khiển cường độ sáng

Điều khiển ánh sáng bằng nút nhấn chuyển đổi trên bàn phím. Khi bật, đèn sẽ sáng lên với thời gian trễ nhất định. Theo yêu cầu của người sử dụng, cường độ ánh sáng có thể được điều chỉnh thông qua nút tăng cường độ sáng hoặc nút làm giảm độ chói. Ở đây, cường độ ánh sáng sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển.

Ấn nút công tắc nguồn, hai màu biến thành màu xanh lá cây, đèn sáng sẽ được hiển thị trên bảng ghi độ sáng. Ngoài ra, điểm ánh sáng của nó được điều chỉnh đến mức cần thiết. Hệ thống điều khiển được cung cấp với phần chương trình phần mềm, có thể được sử dụng để bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của bóng đèn. Vì vậy, khi khởi động, nó sẽ sáng lên từ từ để đạt đến điểm cài đặt mắt một vài giây.

Ấn nút điều chỉnh ánh sáng để điều chỉnh cường độ ánh sáng phù hợp với bác sĩ.

**\*Lưu ý:** Khi khởi động, đèn báo nhấp nháy cho thấy bóng đèn đã bị hỏng. Vì vậy, xin vui lòng thay bóng đèn mới ngay lập tức hoặc liên hệ với kỹ sư để được trợ giúp.

### 4. Khi bóng đèn bị sự cố

Khi bóng đèn chính bị hỏng, đèn phụ sẽ tự động chuyển đổi và bật sáng. Trong khi đó, đèn chỉ báo báo động cho bóng đèn chính chiếu sáng để cảnh báo. Khi hoạt động được bình thường, cần thay đổi bóng đèn ngay lập tức.

### 5. Thay đổi vị trí của đèn

Vị trí bóng đèn hoạt động ít hơn sẽ phụ thuộc vào hoạt động của bóng đèn mô. Trước khi sử dụng, kéo tay cầm dưới bảng điều khiển bóng đèn để xoay quanh trục trung tâm hoặc bộ cân bằng quay vòng quanh các đường ống uốn quanh thân đèn. Nếu không, hãy di chuyển bộ cân bằng hoặc làm cho thân đèn xoay xung quanh vị trí cân bằng để có thể đạt được vị trí mong muốn.

**\*Cảnh báo:** Quá trình như đã nêu ở trên chỉ được thực hiện thông qua tay cầm dưới bảng điều khiển. Không bao giờ kéo tay cầm vô trùng, hoặc bảng điều khiển đèn vì như thế có thể bị hỏng.

Khi đèn được di chuyển đến vị trí thích hợp, bạn có thể kéo tay cầm được tiết trùng để chuyển động xoay giữa các bộ phận đèn hoặc thân đèn và có thể xoay quanh các đầu nối.

### 6. Khi sử dụng xong



Bạn phải tắt công tắc nguồn điện, nếu không biến áp sẽ bị hư hỏng do sử dụng ở một khoảng thời gian quá dài.

**Sản phẩm của:** SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT Co., Ltd  
No.7753, Chuannanfeng Highroad, Datuan Town, Pudong New District 201311  
Shanghai, China

*Nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam:*

Tên công ty : Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị Y tế Tuấn Ngọc  
Địa chỉ : Số 36, Ngõ 181, Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội  
Mã số thuế : 0107476867  
Số điện thoại : 024 32247954 Số fax :  
Email : tuangoettsme.jsc@gmail.com

**Tư vấn khách hàng:** Tel: 024 32247954 – Hotline: 0985622996 – 01278813888

