

**TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

**Tên cơ sở đăng ký lưu hành:** Công ty TNHH Thương mại AT&T

**Địa chỉ:** LK11-21, Khu đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
<b>1</b>	<b>Mô tả chủng loại trang thiết bị y tế</b>	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<b>Ống hút mẫu(Pipelle)</b> <b>Chủng loại/Mã sản phẩm : 1103000</b> Dụng cụ được sử dụng để lấy mẫu sinh thiết nội mạc tử cung
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Hút mẫu sinh thiết nội mạc tử cung
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Định hình dụng cụ trong bao bì tiệt trùng để vừa khít với tư thế gấp trước hoặc gấp sau của tử cung</li><li>- Xoay nhẹ dụng cụ từ cổ tử cung đến đáy tử cung</li><li>- Kéo hết pit-tông để tạo áp lực âm</li><li>- Quét chậm đáy tử cung vài lần rồi lên đến lỗ trong tử cung để lấy được toàn bộ mẫu trong khoang tử cung</li><li>- Tiếp tục cho đến khi lấy được các đoạn niêm mạc tử cung</li><li>- Loại bỏ dụng cụ và đẩy pit-tông để thu toàn bộ mẫu</li></ul>
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
<b>2</b>	<b>Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)</b>	Nước đầu tiên cấp đăng ký/cho phép lưu hành trang thiết bị y tế: Pháp
<b>3</b>	<b>Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)</b>	
<b>4</b>	<b>Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế.</b>	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Hải Anh*