




# DỤNG CỤ ỚNG HỨT MẪU (PIPELLE)

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PIPELLE được sử dụng để lấy mẫu sinh thiết nội mạc tử cung.

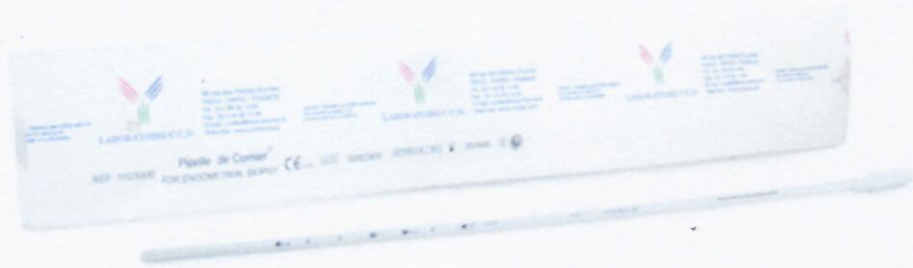

### Các bước sử dụng

- Định hình dụng cụ trong bao bì tiệt trùng để vừa khít với tư thế gấp trước hoặc gấp sau của tử cung
- Xoay nhẹ dụng cụ từ cổ tử cung đến đáy tử cung
- Kéo hết pit-tông để tạo áp lực âm
- Quét chậm đáy tử cung vài lần rồi lên đến lỗ trong tử cung để lấy được toàn bộ mẫu trong khoang tử cung
- Tiếp tục cho đến khi lấy được các đoạn niêm mạc tử cung
- Loại bỏ dụng cụ và đẩy pit-tông để thu toàn bộ mẫu

