

## THÔNG TIN SẢN PHẨM

### 1. Tên sản phẩm:

Scarfree (“CS” Airpore Silicone Gel Sheeting (Non – Sterile))

### 2. Thành phần:

Mút xốp PU, vải không dệt, lớp silicone y tế, giấy tráng phủ

### 3. Kích thước:

Miếng 4 cm x 6 cm

Miếng 6 cm x 12 cm

### 4. Mô tả sản phẩm:

SCARFREE là một miếng gel mỏng, mềm mại và thoải mái làm từ silicone y tế

*Đặc điểm:*

- Hiệu quả giảm sẹo đã được chứng minh lâm sàng.
- Có thể tái sử dụng (Lên đến 15 lần sau khi rửa với các chất tẩy rửa trung tính thích hợp)
- Ít ma sát: Mỏng hơn 3 lần so với các nhãn hiệu khác và cấu trúc film w/PU tốt hơn làm cho SCARFREE được giữ cố định

*Đóng gói:* Hộp 1 miếng

### 5. Mục đích sử dụng/Chỉ định

- Dùng cho vết sẹo cũ, sẹo mới, sẹo đỏ, và sẹo phì đại, sẹo lồi
- Ngăn chặn sự hình thành sẹo

### 6. Hướng dẫn sử dụng

- Nhẹ nhàng làm sạch vết sẹo và rửa bằng nước ấm sạch. Để khô hoàn toàn vết sẹo và vùng da xung quanh.
- Gỡ tấm giấy tráng phủ ra.
- Dán mặt dính lên vết sẹo. Nếu cần có thể sử dụng một lớp băng gạc mỏng để cố định miếng dán Scarfree tại chỗ.
- Vuốt phẳng miếng dán Scarfree trên vết sẹo và đảm bảo rằng miếng dán Scarfree đã dính hoàn toàn.
- Mỗi miếng dán có thể sử dụng trung bình từ 7 đến 14 ngày và tối đa là 30 ngày và mỗi miếng có thể được cắt nhỏ để phù hợp với kích thước của vết sẹo

### 7. Chống chỉ định

- Không sử dụng cho vết thương hở hoặc vết thương bị nhiễm trùng.



➤ Không sử dụng trước khi khâu vết thương.

**8. Cảnh báo và thận trọng**

➤ Không sử dụng cho vết thương hở hoặc vết thương bị nhiễm trùng.

➤ Không sử dụng trước khi khâu vết thương.

**9. Nhà sản xuất:**

Chensin Packing Industry Co. Ltd.

No.7, Ln. 33, Dapu Rd., Sanxia Dist., New Taipei City, Đài Loan

**10. Sở hữu bởi:**

Kwan Star Co., Ltd

21F-1, No. 268, Sec 1, Wen Hwa Road, Banciao Dist., New Taipei City, Đài Loan.

