

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾTên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: **CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT**

Địa chỉ: 225 Thành Công, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp HCM

Tp HCM, Ngày 01 tháng 12 năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Mặt nạ nhựa chịu nhiệt cố định đầu loại U, đầu-cổ-vai loại O (Model: R013B, RD105-2422N, RD207-2422N) – Xuất xứ: Xinjiang Ke Lan Shuang Yi Medical Technology Stock Co., Ltd – Trung Quốc. Mặt nạ nhựa chịu nhiệt là một loại dụng cụ y tế dùng cho việc định vị chính xác và giữ cố định bệnh nhân trong quá trình trị liệu xạ trị. những phương thức điều trị khác.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Mặt nạ nhiệt dẻo Klarity được tạo ra đặc biệt cho khả năng tạo khuôn cao cấp với sự co giãn nhẹ đưa đến sự thoải mái tốt nhất cho bệnh nhân. Loại này được đóng khuôn ôm sát cơ thể bệnh nhân, nâng đỡ chắc chắn, khả năng tái sử dụng chính xác và tiện lợi.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	- Làm nóng bếp hay bể nước đến nhiệt độ khoảng 71 ⁰ -74 ⁰ C - Đặt đế lên bàn điều trị với mức nâng cổ và đầu thích hợp. Xác định các đỉnh ốc trên khung đế cho sự căn chỉnh nhanh khi mặt nạ đã sẵn sàng sử dụng. Đảm bảo mỗi đỉnh ốc nằm trên vị trí chưa khóa. Đặt bệnh nhân lên bàn đế. Lấy mặt nạ ra khỏi túi nhựa đã được bọc kín, Đặt mặt nạ vào trong nước đã nóng. Làm nóng mặt nạ khoảng 1 đến 2 phút(không vượt quá 5 phút), Nhựa dẻo sẽ trong ra khi sẵn sàng. Nâng mặt nạ ra khỏi nước và vẩy khô. / Đảm bảo mặt nạ không quá nóng. Dùng tay đẩy diện tích mặt nạ ra ngoài khoảng 4 đến 6 inches. Định vị mặt nạ qua mặt bệnh nhân. Hơi nghiêng hướng xuống về phía cằm, ấn nhẹ nhàng và đều đặn mặt nạ xuống cho đến khi khung của mặt nạ chạm đế với các đỉnh ốc khớp vào lỗ đế. Ấn sâu đỉnh ốc cho đến khi nó được khóa vào đế. Dùng ngón tay nhẹ nhàng và nhanh chóng định hình mặt nạ theo các đường cong của bệnh nhân (mũi, cằm, vai...) nhớ khuyên bệnh nhân

