

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẶT NẠ CÓ ĐỊNH ĐÀU, ĐÀU-CỔ-VAI BẰNG NHỰA CHỊU NHIỆT

Loại dùng cho đầu ,cổ và sử dụng một lần hay dùng lại nhiều lần.

- 1/Điều chỉnh nhiệt độ bể nước khoảng từ 65⁰-70⁰ C
- 2/Cài đặt đế lên bàn điều trị với độ nâng đầu và cổ thích hợp
- 3/Đặt bệnh nhân lên bàn
- 4/ Đặt mặt nạ vào nước đã làm nóng cho đến khi nhựa dẻo trở nên trong suốt (khoảng 1-2 phút)
- 5/Lấy mặt nạ ra khỏi nước và vẩy khô nhanh . Đảm bảo mặt nạ không quá nóng
- 6/Đặt tâm của mặt nạ lên mặt bệnh nhân. Hơi nghiêng về hướng cằm, ấn nhẹ và đều mặt nạ xuống , qua mặt bệnh nhân, cho đến khi khung ngoài của mặt nạ chạm đế.Các lỗ khung thẳng hàng với đỉnh ốc trên đế và khóa lại với những kẹp xoay.
- 7/Dùng ngón tay, nhẹ nhàng và nhanh chóng tạo hình mặt nạ dọc theo các đường viền của cơ thể bệnh nhân(mũi, môi, gò má...) nhớ nhắc bệnh nhân nhắm mắt lại.
- 8/ Khi mặt nạ nguội, nó trở nên cứng và trở về màu trắng ban đầu. Đừng lấy mặt nạ ra cho đến khi nguội hoàn toàn và để lâu khoảng ít nhất 15 phút trên người bệnh nhân. Mặt nạ sẽ co rút nhẹ nhàng trong quá trình làm nguội. Nếu tháo gỡ mặt nạ quá sớm sẽ dẫn đến sự co rút quá mức và bệnh nhân không thoải mái khi chỉnh sửa lại.
- 9/Nếu có thể, công điều trị được cắt thành mặt nạ bằng cách sử dụng kéo lớn hay kéo cắt khuôn.

Loại tâm lớn dùng cho đầu ,cổ , vai

- 1/Điều chỉnh nhiệt độ bể nước khoảng từ 65⁰-70⁰ C.
- 2/Gắn chính xác tay cầm hay khung vào mặt nạ
- 3/Đặt bệnh nhân với những thiết bị cố định

