

<p><b>HbA1c</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Các tính năng thân thiện với người sử dụng giúp giảm thiểu thời gian đào tạo</li> <li>• Từng bước hướng dẫn được hiển thị trên màn hình.</li> <li>• Người sử dụng được lựa chọn ngôn ngữ.</li> <li>• Chỉ 4ul máu lấy từ mao mạch hoặc tĩnh mạch.</li> <li>• Cho phép lấy mẫu máu dễ dàng và đồng bộ</li> </ul>	<p><b>Hệ thống xử lý dữ liệu</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đầu đọc mã vạch quét dữ liệu hiệu chỉnh, của bệnh nhân và ID của người sử dụng</li> <li>• Bộ nhớ lưu trữ 7000 kết quả.</li> <li>• Người sử dụng có thể lựa chọn kết quả kép, lựa chọn % DCCT, IFCC mmol/mol, % JDS eAg mg/dl hoặc eAG mmol/l.</li> <li>• Cổng USB</li> <li>• Máy in nhãn tùy chọn có sẵn.</li> </ul>
<p><b>Nhanh và chính xác</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cho kết quả chỉ trong 4 phút.</li> <li>• Sử dụng kỹ thuật ái lực Boronate được công nhận rộng rãi vì không bị nhiễu kết quả.</li> <li>• Thang đo: 4_15 % theo chuẩn DCCT A1c (20_141 mmol/ mol theo chuẩn IFCC).</li> <li>• Độ chính xác: CV &lt; 3% ở mức 7% A1c.</li> <li>• Không bị ảnh hưởng bởi biến thể Hb ( không dẫn đến sự giảm hồng cầu).</li> <li>• Theo phương pháp IFCC.</li> </ul>	<p><b>Cấu hình máy</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thể tích: Nhỏ gọn: 95 mm(h) x 205 mm(w) x 135 mm (d).</li> <li>• Trọng lượng: 0.7 kg.</li> </ul>



1 Quét mã vạch hiệu chỉnh và đặt cartridge vào máy



2 Ấn giọt hóa chất vào ống bằng cách đảo ngược dụng cụ lấy mẫu lại



3 Đặt dụng cụ lấy mẫu đã có mẫu vào cartridge



4 Đóng nắp máy phân tích. Kết quả được hiển thị trong 4 phút

Đo HBA1C chính xác,  
kinh tế, đáng tin cậy



Công Ty Nhập Khẩu và phân phối

**Công Ty TNHH TM và DV Kỹ Thuật Đồng Doanh**  
36 Đường K5 P12 Quận Tân Bình TpHCM  
ĐT: 08-38110451 Fax: 08-38119658  
Hotlines: 0903928623 – 0903988628 – 0903110551  
Email: dodomed@hcm.vnn.vn

**Manufacturer**

Quotient Diagnostics Ltd  
Russell House, Molesey Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, UK  
KT12 3PE  
Tel. +44 (0)1932 220 124

**Sales**

EKF Diagnostics Holdings plc  
Avon House, 19 Stanwell Road,  
Penarth, Cardiff, UK CF64 2EZ  
Tel. +44 (0)29 20 710570  
www.ekfdiagnostics.com



ISO13485:  
2003 Certified.  
Registration ref:  
MD 505902

**EKF**  
DIAGNOSTICS

SCIENCE MADE SIMPLE