



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á

Địa chỉ : Tầng 6, tòa 25T2 phố Hoàng Đạo Thúy, p. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

Điện thoại : (+84) 4 38 736 384 Fax: (+84) 4 38 736 312

Hotline : 0979 012 036

Mã số thuế: 0102 565 224

Email : info@taybaca.vn **Website** : taybaca.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Giới thiệu:

Ống nghe y tế sản xuất bởi hãng SUZUKEN Co., Ltd nhỏ, gọn, nhẹ với nhiều tính năng vượt trội có thể nghe âm thanh chính xác và dễ dàng hơn rất nhiều. Thiết bị đơn giản, dễ sử dụng, hiệu quả về chi phí và hiệu suất hoạt động đáp ứng các yêu cầu của cơ sở y tế.

Hướng dẫn sử dụng:

- Thông báo cho bệnh nhân và được sự đồng ý của bệnh nhân.
- Để bệnh nhân ở tư thế thoải mái.
- Tư thế bệnh nhân: ngồi, nằm ngửa, nghiêng sang bên tùy cơ quan được khám.
- Áp hai nút ống nghe vào hai lỗ tai, trục dọc của nút tai phải khớp với trục dọc của ống tai ngoài.
- Kiểm tra ống nghe xem nghe có rõ không?
- Chọn màng tùy theo âm mà ta muốn nghe.
- Khi nghe bằng màng cần ấn chặt màng trên da bệnh nhân.
- Lưu ý: khi thay đổi lực ấn khi áp tai nghe lên da bệnh nhân thay đổi mức độ lọc tần số:
 - + lực ấn nhẹ chủ yếu nghe được âm tần số thấp.
 - + lực ấn mạnh chủ yếu nghe được âm tần số cao.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Nhung