

CÔNG TY CP TM THỤY AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2017

MẪU NHÃN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
SẼ SỬ DỤNG KHI LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

QUE THỬ PEROXIDE DIAQUANT®

Số lưu hành:

Mã sản phẩm: 932002

Hạn sử dụng: Xem “” trên hộp

Số Lot: Xem số “LOT” trên hộp

Thành phần: lọ chứa 100 que thử

Sản phẩm sử dụng 1 lần

Hướng dẫn sử dụng: Đặt que thử vào dung dịch cần kiểm tra trong 1 giây. Lắc que thử để loại bỏ chất dư thừa trên que. Sau đó đợi 5 giây. Cuối cùng so sánh màu sắc với thang đo. Lấy giá trị phù hợp nhất với trường thử màu (độ chính xác $\pm 1/2$ trường màu của thang). Yêu cầu đánh giá màu sắc trong khoảng thời gian quy định để đạt kết quả chính xác nhất

Cảnh báo: đánh giá màu sắc bằng ánh sáng ban ngày. Không chạm vào vùng test. Các nút chứa que thử có chứa thành phần không độc đã được làm khô. Nếu nứt, hãy uống thật nhiều nước.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C và độ ẩm tương đối khoảng từ 30% đến 80%.

Nhà sản xuất: MACHEREY-NAGEL GmbH & Co.KG

Địa chỉ: Neumann-Neander-Str.6-8, 52355 Duren, Germany

Nhập khẩu & phân phối: Công ty Cổ phần Thương Mại Thụy An.


Đại chi: 5-7 Hoàng Việt, P 4, Quận Tân Bình, HCM;

Xuất xứ: Đức

QUE THỬ PEROXIDE S DIAQUANT®

Số lưu hành:

Mã sản phẩm: 932007

Hạn sử dụng: Xem “” trên hộp

Số Lot: Xem số “LOT” trên hộp

Thành phần: lọ chứa 100 que thử

Sản phẩm sử dụng 1 lần

Hướng dẫn sử dụng: Đặt que thử vào dung dịch cần kiểm tra trong 1 giây. Lắc que thử để loại bỏ chất dư thừa trên que. Sau đó đợi 15 giây. Cuối cùng so sánh màu sắc với thang đo. Lấy giá trị phù hợp nhất với trường thử màu (độ chính xác $\pm 1/2$ trường màu của thang). Yêu cầu đánh giá màu sắc trong khoảng thời gian quy định để đạt kết quả chính xác nhất

Cảnh báo: đánh giá màu sắc bằng ánh sáng ban ngày. Không chạm vào vùng test. Các nút chứa que thử có chứa thành phần không độc đã được làm khô. Nếu nứt, hãy uống thật nhiều nước.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C và độ ẩm tương đối khoảng từ 30% đến 80%.

Nhà sản xuất: MACHEREY-NAGEL GmbH & Co.KG

Địa chỉ: Neumann-Neander-Str.6-8, 52355 Duren, Germany

Nhập khẩu & phân phối: Công ty Cổ phần Thương Mại Thụy An.

Đại chi: 5-7 Hoàng Việt, P 4, Quận Tân Bình, HCM;

Xuất xứ: Đức

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Giám đốc

