




## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÚI ĐO HUYẾT ÁP

### I. Lắp ráp và sử dụng:

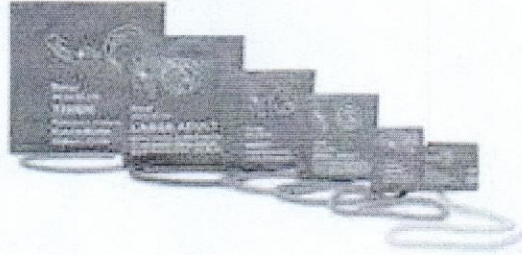

1. Chọn đúng loại túi đo huyết áp phù hợp với từng loại bệnh nhân cụ thể
2. Kết nối túi đo với Monitor thông qua dây nối túi đo huyết áp loại không xâm lấn
3. Cố định túi đo trên bắp tay bệnh nhân sao cho vị trí dây nối gần nhất với động mạch cách tay để đảm bảo độ chính xác cao nhất

### II. Quy trình bảo dưỡng

1. Tháo túi đo huyết áp ra khỏi bệnh nhân và Monitor
2. Vệ sinh khử trùng túi đo
3. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát

**Hotline Kỹ Thuật Đức Nguyễn**  
**0917 882 449**