



ĐỨC NGUYỄN

**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN**

Số 2 đường 1F, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh

Điện thoại: (08) 54336336 Fax: (08) 54318835


Email: sales@ducnguyen-medical.com

Website: www.ducnguyen-medical.com



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU ỚNG NỐI ĐO HUYẾT ÁP

### I. Lắp ráp và sử dụng:

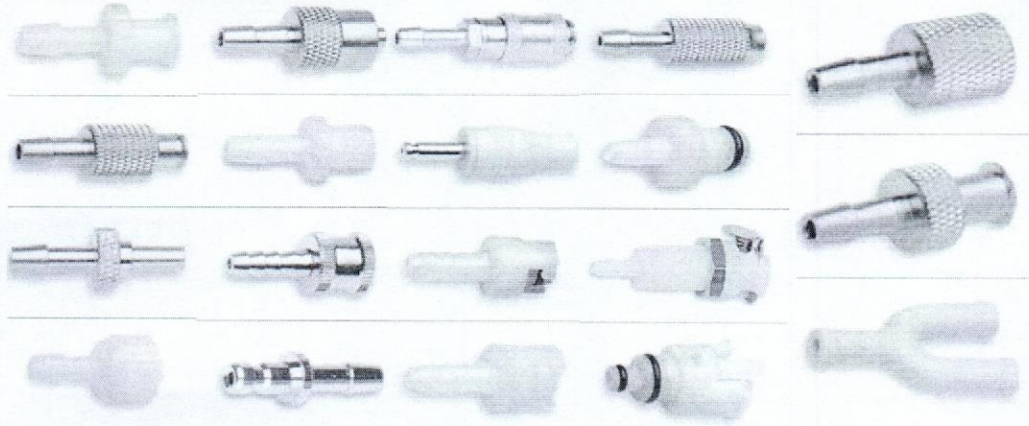

1. Chọn đúng loại đầu ống nối đo huyết áp phù hợp với từng loại Monitor
2. Kết nối đầu ống nối đo huyết áp với Monitor và dây nối túi đo huyết áp
3. Cố định túi đo trên bắp tay bệnh nhân sao cho vị trí dây nối gần nhất với động mạch cách tay để đảm bảo độ chính xác cao nhất

### II. Quy trình bảo dưỡng

1. Tháo đầu ống nối đo huyết áp ra khỏi Monitor
2. Vệ sinh khử trùng đầu ống nối đo huyết áp
3. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát

**Hotline Kỹ Thuật Đức  
Nguyễn  
0917 882 449**