

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÀN HÌNH CHUYÊN DỤNG DÙNG TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI

I/-Cổng kết nối tín hiệu:

1. DVI-D : Cổng chấp nhận tín hiệu vào là DVI-D
2. S-Video: Cổng chấp nhận tín hiệu vào là S-Video
3. RGBS (VGA) : Cổng chấp nhận tín hiệu vào là RGBS (VGA)
4. Composite / FBAS : Cổng chấp nhận tín hiệu vào là Composite / FBAS

II/-Các phím điều khiển

1. INPUT: Đèn tín hiệu báo màn hình đang hoạt động và cho phép lựa chọn nguồn tín hiệu vào bằng tay.
2. Phím Menu mở bảng điều khiển chính
3. Phím điều khiển cuộn đến các chức năng


+ - Phím chỉnh tăng giảm, sang trái / phải



Phím chỉnh sáng / độ tương phản:




Nhấn 1 lần: Chỉnh độ sáng, dùng phím tăng / giảm

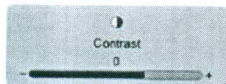

Nhấn 2 lần: Chỉnh độ tương phản, dùng phím tăng / giảm



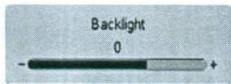

Nhấn 3 lần: Chính độ sáng nền, dùng phím tăng / giảm. Độ sáng nền càng thấp, tuổi thọ màn hình càng tăng.

III/- Các lưu ý khác:

1. Nên tham khảo kỹ hướng dẫn sử dụng từng loại màn hình trước khi vận hành.
2. Lắp chân đế hoặc gắn vào giá treo theo đúng kích thước chuẩn
3. Đặt màn hình cố định trên xe đẩy hoặc giá treo và cẩn thận khi di chuyển.
4. Không tự ý tháo lắp chỉnh sửa thiết bị, nên liên hệ nhà cung cấp khi có sự cố.
5. Làm sạch màn hình bằng khăn mềm.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Nguyễn Trường Hải – Giám Đốc

