

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## DỤNG CỤ TÙY BIẾN TỬ CUNG



CÔNG TY TNHH TBYT TRÀNG THI

Hà Nội - 2017

GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thị Thu*



## **I. Quy định chung về quản lý:**

- Dụng cụ tùy biến từ cung là dụng cụ y tế (DCYT) là nguồn lực quan trọng và tốn nhiều chi phí ngân sách để đảm bảo chất lượng điều trị trong bệnh viện
- DCYT phải được sử dụng đúng quy định kỹ thuật bệnh viện và phải được khai thác hết công suất
- DCYT phải được giao trách nhiệm bảo quản và sử dụng cho từng cá nhân đơn vị trong bệnh viện
- Người sử dụng dụng cụ phải có tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm ngặt nội quy, có chứng chỉ đã được đào tạo nghiệp vụ, kỹ thuật đúng chủng loại dụng cụ y tế được giao, nắm được tình trạng hoạt động của thiết bị y tế và ghi sổ kết quả hoạt động hàng ngày.
- Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra các khoa, các phòng trong việc bảo quản sử dụng các DCYT.

## **II. Điều kiện bảo quản:**

- Các DCYT phải được bảo quản trong điều kiện tối ưu, nhằm kéo dài thời gian sử dụng.
- Dụng cụ phải được bảo quản trong hộp hấp chuyên dụng, bao gồm đầy đủ hộp, nắp, khay lưới, tấm mút gai cao su lót đáy, hộp phải có nhãn ngoài ghi tên bộ dụng cụ và khoa phòng quản lý
- Các dụng cụ chuyên biệt có tính nhạy cảm cao như dụng cụ vi phẫu, nội soi, ... cần được bảo quản trong hộp riêng, có lót mút gai và giá cao su tránh xê dịch và va đập.
- Có giàn giá thép đủ vững để các hộp dụng cụ.
- Phòng chứa dụng cụ có đầy đủ hệ thống điều hòa nhiệt độ, thông gió, hút ẩm.
- Có hồ sơ lý lịch các DCYT, sổ nhật ký theo dõi sử dụng các DCYT hàng ngày và bàn giao ca, ghi rõ các dụng cụ lấy ra do hư hỏng, dụng cụ thay thế, bảo dưỡng định kỳ,...
- Có bảng nội quy bảo quản, lau rửa, hấp sấy tiệt trùng các DCYT.

## **III. Hướng dẫn sửa chữa:**

- Khi dụng cụ bị hỏng, người sử dụng phải ngừng sử dụng dụng cụ này, báo cáo trưởng phòng mổ và trưởng phòng vật tư, thiết bị y tế để lập biên bản sự cố xác định nguyên nhân, quy trách nhiệm và tìm biện pháp sửa chữa.
- + Nếu hỏng do yếu tố chủ quan của người sử dụng thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
- + Nếu DCYT hỏng do khách quan, trong thời gian bảo hành: phòng vật tư sẽ tiếp nhận và báo cho hãng cung cấp DCYT đến để thực hiện việc bảo hành, trong thời gian chờ sửa chữa hãng phải có trách nhiệm cho bệnh viện mượn DCYT thay thế.



- + Nếu DCYT hỏng đã hết thời gian bảo hành: phòng vật tư tiếp nhận và tìm biện pháp sửa chữa hoặc đề xuất với hãng cung cấp biện pháp sửa chữa với chi phí hợp lý
- Nghiêm cấm việc tự ý sử dụng DCYT không thuộc trách nhiệm được giao, sử dụng DCYT sai mục đích, tự ý sửa chữa
- Khi sửa chữa, thay thế các bộ phận hỏng của dụng cụ nhạy cảm, đất tiền phải có sự tham dự ít nhất 2 người: phẫu thuật viên sử dụng và người sửa chữa
- Việc thanh lý DCYT hỏng không có khả năng sửa chữa phải được tiến hành mọi thủ tục theo đúng quy định

#### **IV. Hướng dẫn lau rửa, tiệt trùng DCYT:**

- Với các DCYT phẫu thuật thông thường có vật liệu thép y tế không ri: lau rửa, hấp ẩm tiệt trùng theo quy trình thông thường
- Với các DCYT có khe, ống, khớp khó lau rửa: cần có các chổi và phương tiện phù hợp để làm sạch bên trong, có xi lanh để bơm rửa
- Với các DCYT đặc biệt, đất tiền, dành cho vi phẫu,... cần lau rửa riêng một cách cẩn thận, để trong khay riêng khi bảo quản hay gửi hấp
- Với các DCYT có vật liệu nhạy cảm với nhiệt độ, độ ẩm, hóa chất... cần thực hiện phương pháp tiệt trùng phù hợp như EtO, Sterrad.

