

Ngày 09 tháng 01 năm 2018

## **TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

- Tên cơ sở: **Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh**
- Địa chỉ 252 - 254 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, là cơ sở công bố trang thiết bị y tế :

<b>Stt</b>	<b>Túi chườm lạnh</b>	
1	Mục đích/chỉ định sử dụng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khi bị bong gân, sai khớp, bầm dập cơ, bị sưng do va chạm, sốt, chảy máu cam, đau đầu, cháy nắng hay bỏng nhẹ, côn trùng cắn ...</li><li>- Giúp giảm đau và phù nề do làm tăng ngưỡng kích thích của các sợi cơ, gây co mạch, giảm lượng máu lưu thông ở vùng tổn thương.</li></ul>
2	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mở nắp túi chườm rồi cho nước đá vào trong túi chườm rồi vận chặt nắp lại (nhiệt độ nước đá khoảng 0<sup>0C</sup>-3<sup>0C</sup>). Đặt túi chườm lên vùng cần chườm, nên lót 1 lớp khăn mỏng để tránh bị tổn thương do lạnh.</li></ul>

Người đại diện hợp pháp của cơ sở   
GIÁM ĐỐC



**THS. NGUYỄN VĂN THẮNG**