



## CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN

Số 2 đường 1F, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh

Điện thoại: (028) 54336336 Fax: (028) 54318835

Email: sales@ducnguyen-medical.com

Website: www.ducnguyen-medical.com

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VAN THỜ

#### **I. Lắp ráp và sử dụng:**



Van thở ra dùng 1 lần cho dây thở 1 nhánh và 2 nhánh

Van thở ra dùng nhiều lần

1. Chọn đúng loại van thở phù hợp với thiết bị
2. Lắp van vào bộ dây thở, cài đặt thông số máy thở và vận hành máy

#### **II. Quy trình bảo dưỡng**

1. Ngắt kết nối với bệnh nhân, tắt máy thở
2. Loại bỏ đối với van thở dùng 1 lần và mang đi hấp tiệt khuẩn đối với loại dùng nhiều lần

**Hotline Kỹ Thuật Đức Nguyễn**

**0917 882 449**