

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÔNG TY TNHH FAMITH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Khẩu Trang Y Tế.

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 01 năm 2018

Đại diện có thẩm quyền
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
FAMITH
CAO HỒNG MINH



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm này được áp dụng cho sản phẩm Khẩu trang y tế do **CÔNG TY TNHH FAMITH** sản xuất.

1. Công dụng sản phẩm

Khẩu trang y tế bảo vệ sức khỏe, không gây kích ứng da khi sử dụng, có tác dụng:

- Chống khói bụi, chống viêm mũi dị ứng, chống tia cực tím, ngăn dịch bệnh, khí thải động cơ, mùi ô nhiễm;
- Ngăn chặn các hóa chất độc hại, chống say tàu xe.
- Khẩu trang chỉ dùng một lần

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

STT	Sản phẩm	Mục đích/ chỉ định sử dụng	Hướng dẫn sử dụng	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm
1	Khẩu trang y tế	Sử dụng trong: <ul style="list-style-type: none">- Bệnh viện, Phòng khám, Nha khoa- Trung tâm thẩm mỹ- Môi trường công nghiệp- Phòng dịch bệnh- Sử dụng chống khói bụi hằng ngày	Bóc bao bì sản phẩm và sử dụng theo 3 bước sau: <ul style="list-style-type: none">- Bước 1: Giữ 2 dây đeo bằng tay và kéo khẩu trang sang 2 bên, áp khẩu trang sát vào mặt- Bước 2: Đeo dây quai qua tai và điều chỉnh thanh nẹp mũi sao cho khít với phần song mũi và khuôn mặt- Bước 3: Định hình lại chiếc khẩu trang để có thể che phủ được phần sát mắt và dưới cằm, điều chỉnh khẩu trang đeo một cách thoải mái nhất	Sản phẩm an toàn khi bao bì, tem chống hàng giả không bị rách, hở và còn hạn sử dụng

