

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

### Nhóm dụng cụ “Cura” dùng cho Bộ dụng cụ phẫu thuật V. Muller, Snowden – Pencer, Genesis

- Dùng trực tiếp bằng tay để thực hiện trong quá trình phẫu thuật. Được sử dụng nhiều lần sau khi được tiệt trùng.

#### Chuẩn bị phương tiện :

- Xà phòng, bàn chải và các phương tiện cọ rửa phù hợp với từng dụng cụ.
- Dung dịch khử khuẩn ban đầu.
- Khan lau, gang tay sạch.
- Pha dung dịch khử khuẩn ban đầu : Pha dung dịch khử khuẩn ban đầu vào xô theo nồng độ hướng dẫn của từng loại dung dịch.
- Ngâm dụng cụ phẫu thuật vào dung dịch khử khuẩn.
- Cho dụng cụ phẫu thuật vào thùng/xô đựng dung dịch khử khuẩn trong 5-10 phút.
- Tráng dụng cụ phẫu thuật bằng nước sạch.
- Vớt dụng cụ phẫu thuật ra khỏi dung dịch khử khuẩn và tráng dụng cụ dưới vòi nước chảy.
- Cọ rửa dụng cụ : Dùng bàn chải đánh kỹ các góc ngách, khe kẽ của từng dụng cụ. Đối với dụng cụ sắc nhọn nên đánh theo 1 chiều.
- Làm khô dụng cụ : làm khô dụng cụ bằng khăn sạch và tra dầu vào các khớp nối.
- Đóng gói dụng cụ : Cho dụng cụ vào hộp hoặc túi gói dụng cụ chuyên dụng, dán băng chỉ thị màu, dán nhãn ghi ngày xử lý, tên người xử lý.
- Tiệt khuẩn dụng cụ: Cho dụng cụ vào máy tiệt khuẩn phù hợp.
- Bảo quản dụng cụ : Dụng cụ có thể được sử dụng ngay hoặc đặt trong tủ lưu giữ dụng cụ.

**CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA**  
**GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN LÊ QUANG VŨ**