

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Dụng cụ kéo dùm cho Bộ dụng cụ phẫu thuật V. Muller®, Snowden pincer.

- Dùm trực tiếp bằng tay để thực hiện trong quá trình phẫu thuật. Được sử dụng nhiều lần sau khi được tiệt trùng.

Chuẩn bị phương tiện :

- Xà phòng, bàn chải và các phương tiện cọ rửa phù hợp với từng dụng cụ.
- Dung dịch khử khuẩn ban đầu.
- Khan lau, gang tay sạch.
- Pha dung dịch khử khuẩn ban đầu : Pha dung dịch khử khuẩn ban đầu vào xô theo nồng độ hướng dẫn của từng loại dung dịch.
- Ngâm dụng cụ phẫu thuật vào dung dịch khử khuẩn.
- Cho dụng cụ phẫu thuật vào thùng/xô đựng dung dịch khử khuẩn trong 5-10 phút.
- Tráng dụng cụ phẫu thuật bằng nước sạch.
- Vớt dụng cụ phẫu thuật ra khỏi dung dịch khử khuẩn và tráng dụng cụ dưới vòi nước chảy.
- Cọ rửa dụng cụ : Dùng bàn chải đánh kỹ các góc ngách, khe kẽ của từng dụng cụ. Đối với dụng cụ sắc nhọn nên đánh theo 1 chiều.
- Làm khô dụng cụ : làm khô dụng cụ bằng khăn sạch và tra dầu vào các khớp nối.
- Đóng gói dụng cụ : Cho dụng cụ vào hộp hoặc túi gói dụng cụ chuyên dụng, dán băng chỉ thị màu, dán nhãn ghi ngày xử lý, tên người xử lý.
- Tiệt khuẩn dụng cụ: Cho dụng cụ vào máy tiệt khuẩn phù hợp.
- Bảo quản dụng cụ : Dụng cụ có thể được sử dụng ngay hoặc đặt trong tủ lưu giữ dụng cụ.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CÔNG NGHỆ
AN PHA
QUẬN 11 TP. HỒ CHÍ MINH



NGUYỄN LÊ QUANG VŨ