

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT**

SỐ 9 ĐƯỜNG LAM SƠN, PHƯỜNG 05, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày 07 tháng 03 năm 2018

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Vật liệu tẩy trắng răng WHITENESS HP Automix là vật liệu được sử dụng trong nha khoa.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Dùng để làm sạch các mảng bám trên răng lâu ngày giúp răng trắng sáng hơn sau mỗi lần điều trị.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Bước 1: Lấy vôi răng và vệ sinh sạch sẽ vùng răng được tẩy trắng. Bước 2: Bôi thuốc chống nhạy cảm ngà KF2% để trong vòng 10phút sau đó rửa sạch. Bước 3: Cách ly nước bằng TOPDAM. Bước 4: Bôi thuốc lên răng trong 45phút rồi làm sạch. Bước 5: Đánh bóng và làm sạch răng, gỡ bỏ cách ly nước.
1.5	Chống chỉ định	Sử dụng đúng kỹ thuật và quy trình của nhà sản xuất.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Sản phẩm được sử dụng bởi bác sĩ nha khoa.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
	Braxin	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
	Braxin	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	Tất cả sản phẩm được sử dụng bởi bác sĩ nha khoa. Bảo quản ở nhiệt độ phòng.

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



GIÁM ĐỐC
Vũ Huy Hoàng

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT

SỐ 9 ĐƯỜNG LAM SƠN, PHƯỜNG 05, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày 07 tháng 03 năm 2018

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Vật liệu tẩy trắng răng WHITENESS HP Maxx là dụng cụ được sử dụng trong nha khoa.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Dùng để làm sạch các mảng bám trên răng lâu ngày giúp răng trắng sáng hơn sau mỗi lần điều trị.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Bước 1: Lấy vôi răng và vệ sinh sạch sẽ vùng răng được tẩy trắng. Bước 2: Bôi thuốc chống nhạy cảm ngà KF2% để trong vòng 10 phút sau đó rửa sạch. Bước 3: Cách ly nước bằng TOPDAM. Bước 4: Trộn thuốc theo tỷ lệ 3-1 bôi lên răng 3 lần/mỗi lần cách nhau 15 phút.. Bước 5: Đánh bóng và làm sạch răng, gỡ bỏ cách ly nước
1.5	Chống chỉ định	Sử dụng đúng kỹ thuật và quy trình của nhà sản xuất.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Sản phẩm được sử dụng bởi bác sĩ nha khoa.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	Braxin
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	Braxin
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	Tất cả sản phẩm được sử dụng bởi bác sĩ nha khoa. Bảo quản ở nhiệt độ phòng.



GIÁM ĐỐC
Vũ Huy Hoàng

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT**

SỐ 9 ĐƯỜNG LAM SƠN, PHƯỜNG 05, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày 07 tháng 03 năm 2018

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Vật liệu tẩy trắng răng WHITENESS HP Blue là vật liệu được sử dụng trong nha khoa.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Dùng để làm sạch các mảng bám trên răng lâu ngày giúp răng trắng sáng hơn sau mỗi lần điều trị.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Bước 1: Lấy vôi răng và vệ sinh sạch sẽ vùng răng được tẩy trắng. Bước 2: Bôi thuốc chống nhạy cảm ngà KF2% để trong vòng 10phút sau đó rửa sạch. Bước 3: Cách ly nướu bằng TOPDAM. Bước 4: Bôi thuốc lên răng trong 45phút rồi làm sạch. Bước 5: Đánh bóng và làm sạch răng, gỡ bỏ cách ly nướu
1.5	Chống chỉ định	Sử dụng đúng kỹ thuật và quy trình của nhà sản xuất.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Sản phẩm được sử dụng bởi bác sĩ nha khoa.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
	Braxin	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
	Braxin	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	Tất cả sản phẩm được sử dụng bởi bác sĩ nha khoa. Bảo quản ở nhiệt độ phòng.

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



GIÁM ĐỐC
Vũ Huy Hoàng