



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ÉP KHAY DUY TRÌ CHỈNH NHA ERKOFORM-3D MOTION


Hãng sản xuất: ERKODENT - Đức

I. Chuẩn bị máy:

- ❖ Nối máy vào nguồn điện 220V
- ❖ Bật nút nguồn


II. Sử dụng:

Màn hình chính:

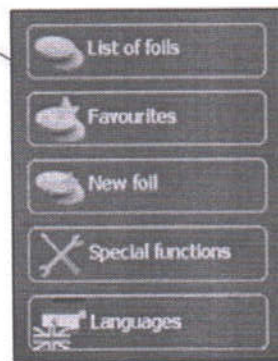


1. Chọn ngôn ngữ:

Chạm vào bảng điều để chọn ngôn ngữ thích hợp

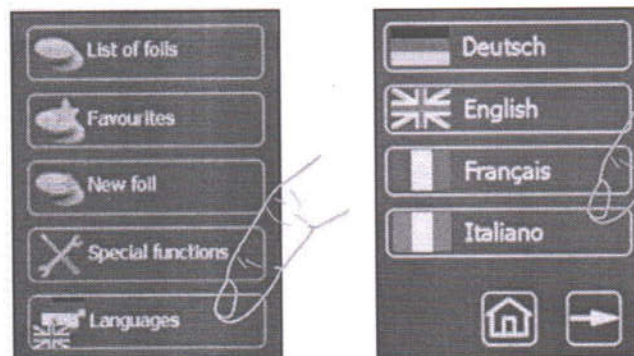


2. Chọn loại phôi và kích thước:

- Chạm vào bảng điều khiển như hình dưới đây:

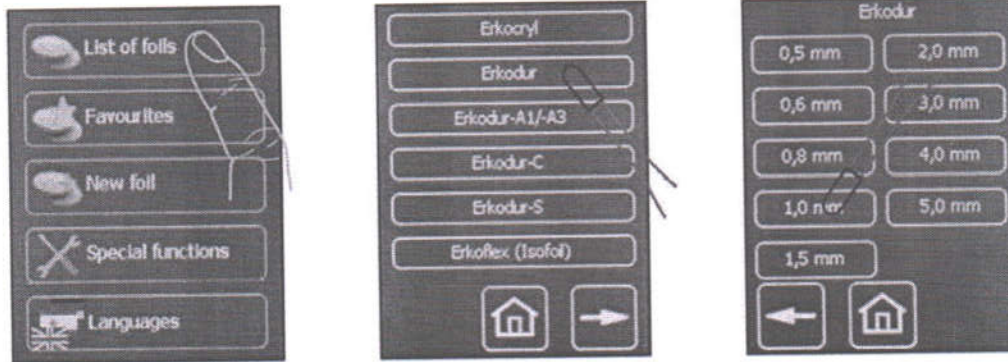

3. Bắt đầu thực hiện ép máng nhựa:

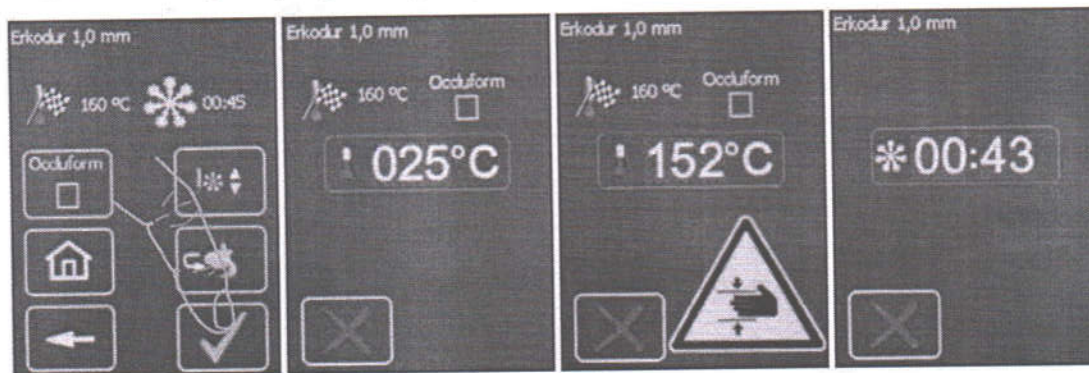

Bắt đầu

® Phôi bắt đầu được làm nóng
® Màn hình thể hiện nhiệt độ của máy hiện tại

® Quá trình ép phôi đang diễn ra
® Không được chạm vào lúc này

® Thời gian làm nguội còn lại



III. Bảo quản:

- ❖ Lau chùi máy bằng khăn ẩm
- ❖ Không dùng chất tẩy rửa để vệ sinh



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ÉP KHAY DUY TRÌ CHỈNH NHA ERKOPRESS

Hãng sản xuất: ERKODENT - Đức

I. Chuẩn bị máy:



- ❖ Nối máy vào nguồn điện 220V
- ❖ Bật nút nguồn



II. Sử dụng:

Màn hình chính sẽ hiện lên như sau

Sử dụng ngón tay hoặc đầu cọ để điều khiển

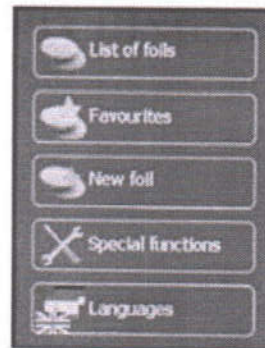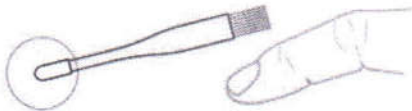


1. Chọn ngôn ngữ:

Chạm vào bảng điều để chọn ngôn ngữ thích hợp



2. Chọn loại phôi và kích thước:


- Chạm vào bảng điều khiển như hình dưới đây:

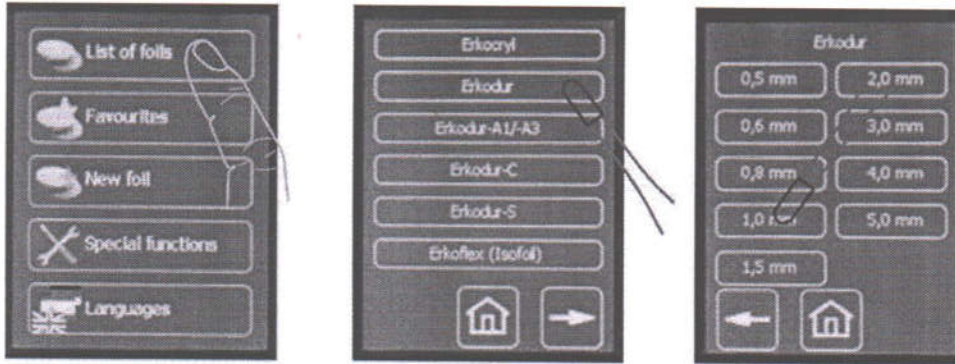


3. Lưu/ Xóa vào mục “Ưu thích”:

*Lưu vào mục “Ưu thích”:

Cho phép lựa chọn nhanh hơn
đối với các loại phôi thường dùng

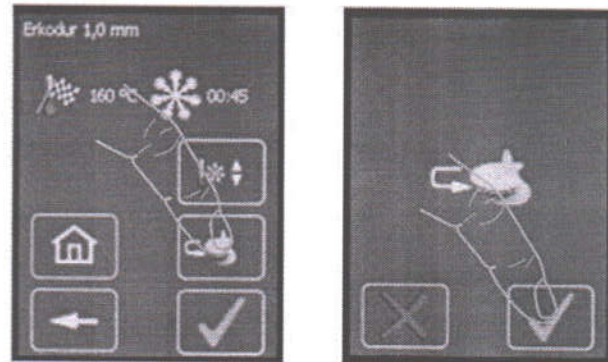


** Xóa khỏi mục “Ưu thích”

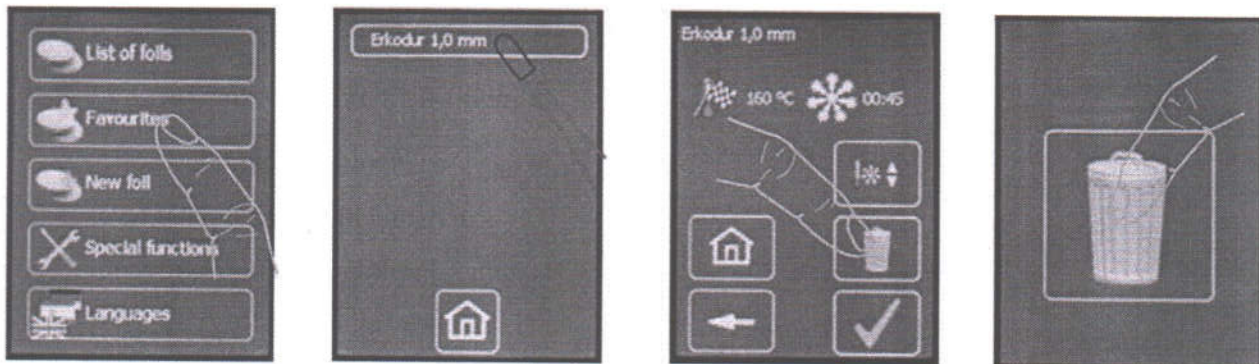

3526
CÔNG TY TNHH TMDV NVDENT
TP. PHỐ

3. Bắt đầu thực hiện ép máng nhựa:

** Cách đặt phôi vào máy:

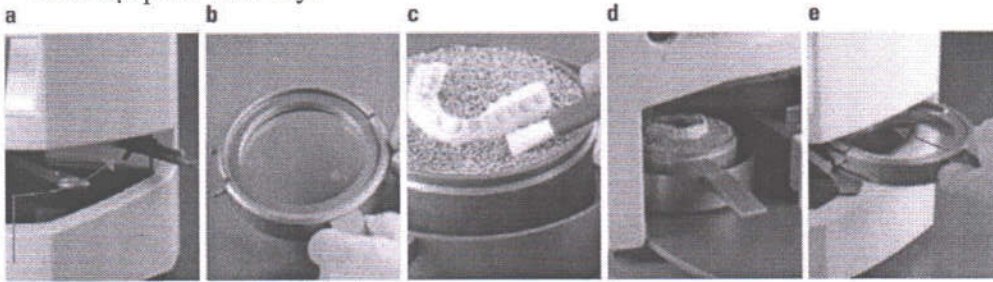

** Tiến hành



Ⓡ Xác nhận bắt đầu

Ⓡ Bắt đầu làm nóng
Ⓡ Nhiệt độ máy hiện tại

Ⓡ Chú ý máy sẽ thực hiện ép nóng ngay

Ⓡ Thời gian làm nguội còn lại



Ⓡ Việc ép nóng hoàn thành
Ⓡ Lấy phôi ra khỏi máy



III. Bảo quản:

- ❖ Lau chùi máy bằng khăn ẩm
- ❖ Không dùng chất tẩy rửa để vệ sinh