


## Cách lắp đặt can chứa dịch 800cc

Thiết bị NPWT của Foryou nên được sử dụng kết hợp với can chứa dịch và bộ băng dán. Người dùng nên sử dụng các phụ kiện được khuyến nghị.

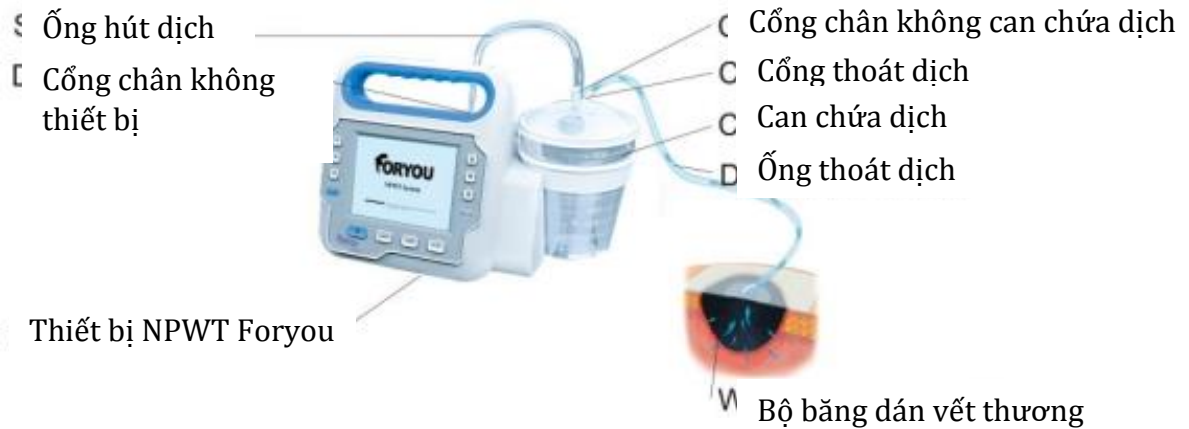

### 1. Gắn bộ cố định can chứa dịch

Bộ cố định can chứa dịch phải được gắn trước khi sử dụng. Gắn bộ cố định can chứa dịch vào đường khóa bên phải thiết bị. Bảo đảm rằng không có khoảng không trống giữa bộ đỡ và thiết bị. (Hình 1)

### 2. Gắn can chứa dịch

Trước khi gắn can chứa dịch, bảo đảm rằng cổng thoát dịch kết nối với bệnh nhân nằm ở phía trên.

Đặt can chứa dịch theo chiều dọc vào trong bộ cố định và đẩy nhẹ can chứa dịch qua lại để xem can đã được cố định hay chưa.

Xoay can chứa dịch để cho cổng chân không hướng vào trong về phía thiết bị và cổng kết nối với bệnh nhân thì hướng ra ngoài. (Hình 2)



Hình 1

Hình 2

### 3. Kết nối ống hút dịch

1. Kết nối 1 đầu của ống hút dịch vào cổng chân không trên thiết bị. (Hình 3)
2. Kết nối đầu còn lại của ống hút dịch vào cổng chân không trên can chứa dịch. (Hình 4)
3. Gắn phễu kết nối vào cổng thoát dịch trên can chứa dịch. (Hình 5)
4. Sau khi hoàn thành các bước trên, hệ thống sẽ như minh họa trong Hình 6.



Hình 3



Hình 4



Hình 5



Hình 6