

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẶT NẠ THỞ



Lắp ráp và sử dụng:



1. Lắp mặt nạ thở vào đầu bệnh nhân
2. Lắp bộ dây thở vào mặt nạ thở
3. Chọn các thông số thở và vận hành máy thở.

II. Quy trình bảo dưỡng

1. Tháo mặt nạ thở ra khỏi bộ dây thở
2. Tháo các thành phần của mặt nạ thở và hấp tiệt trùng
3. Đảm bảo thiết bị được tiệt trùng trước khi dùng cho bệnh nhân mới

Hotline Kỹ Thuật Đức Nguyễn
0917 882 449