

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Bật công tắc ON, kết nối với máy tính.
- Sau khi vào màn hình Windows xong thì khởi động phần mềm bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng phần mềm trên màn hình.
- Giao diện chương trình sẽ hiển thị, vào giao diện khai báo hàm cần quét.
- Nhập vào hàm cần quét vào trên máy và nhấn nút quét.
- Kết thúc thao tác quét, phần mềm sẽ hiển thị file quét và lưu lại theo định dạng 3D.