



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHẠM LÊ
PHAM LE TRADING IMPORT- EXPORT CO., LTD.

Đ/c: 359/14 đường Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 10, TPHCM
Tel: 028 39382968 Fax: 028 39382968 E-mail: phalimex@gmail.com
MST: 0314449910

Số: 08/TLHD-CT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 05 năm 2018

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GĂNG TAY CAO SU NITRILE Y TẾ

1. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

GĂNG TAY CAO SU NITRILE Y TẾ (*Găng tay cao su Nitrile khám bệnh sử dụng một lần*)
đạt các tiêu chuẩn Việt nam và quốc tế hiện hành:

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và ISO 13485:2003;
- Phù hợp với các tiêu chuẩn: TCVN 6343-1:2007, tiêu chuẩn ISO 11193-1:2002; tiêu chuẩn Mỹ ASTM D 6319.

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Sử dụng găng tay cao su nitrile y tế được xem như một rào cản sinh học để bảo vệ người sử dụng và bệnh nhân trước các vấn đề về vệ sinh và lây nhiễm bệnh. Dù vậy cũng phải thực hiện đúng cách như vệ sinh tay ngay trước khi mang găng tay, không bao giờ được sử dụng găng tay thay thế cho việc vệ sinh tay.
- Găng tay cao su nitrile y tế có thể dùng để đeo được cho cả hai tay trái và phải (ambidextrous) và là loại chưa tiệt trùng.
- Găng tay cao su nitrile y tế không dùng thay thế cho găng phẫu thuật (khi trực tiếp mổ cho bệnh nhân).
- Khi sử dụng găng tay cần vệ sinh tay, đeo găng tay, thực hiện các thao tác thủ thuật, tháo găng tay ngay sau khi xong việc, loại bỏ và xử lý găng một cách an toàn, vệ sinh lại tay. Nên nhớ rằng vệ sinh tay là vấn đề luôn luôn cần thiết, thậm chí cả khi có sử dụng găng tay và cần để sẵn găng tay cùng với nơi vệ sinh cho thuận tiện việc sử dụng.
- Phải thay găng tay ngay nếu găng bị rách, thủng và xử lý găng bị hư hỏng ngay bằng cách sử dụng các thiết bị phù hợp. Cần tháo bỏ, xử lý và sử dụng găng tay mới giữa các thao tác khác nhau trên cùng một bệnh nhân



khi tiên lượng sẽ có khả năng bất kỳ nào đó có sự lây nhiễm mầm bệnh từ bộ phận này sang bộ phận khác. Nên tháo bỏ, xử lý ngay khi tiếp xúc với một bệnh nhân hoặc một bề mặt có khả năng đã bị nhiễm khuẩn và sử dụng găng tay mới khi tiếp xúc với bệnh nhân hoặc một môi trường khác. Chú ý việc vệ sinh ngay lập tức sau khi loại bỏ và xử lý găng tay.

- Cảnh báo và cẩn trọng:
 - Không dùng găng bị rách, găng có lỗ thủng, găng đã quá hạn sử dụng.
 - Không dùng găng trong môi trường xăng, dầu và các chất an mòn hóa học.
 - Không sử dụng thêm bột bôi trơn loại không an toàn để dễ đeo găng.
 - Sau khi sử dụng xong phải hủy găng trong lò đốt rác y tế, theo quy định của Bộ Y tế.

Tp.HCM, ngày 3 tháng 05 năm 2018
Người đại diện pháp luật của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số.



Phạm Thị Thùy Trâm