





HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TRỢ THÍNH

Mimitakara JAPAN model: UP-6K53

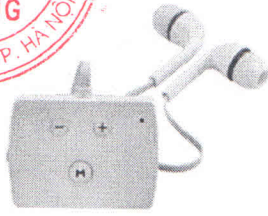

1. THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Tên sản phẩm: Máy trợ thính pin sạc Bluetooth đeo cổ
- Thương hiệu: Mimitakara – Japan
- Model: UP-6K53
- Nguồn: Pin sạc (Có thể sử dụng được 11 giờ liên tục, trên 500 lần sạc)
- Âm thanh đầu ra cực đại: 45dB \pm 5dB
- Kiểu kết nối: Bluetooth
- Kích thước: 45 x 33 x 14 mm
- Trọng lượng: 22.4g
- Bộ sản phẩm bao gồm:
 - Thân máy.
 - Hộp đựng máy
 - Bộ cấp điện cổng USB (Điện áp làm việc 220V AC)
 - Dây sạc qua cổng USB
 - Chổi vệ sinh máy
 - Nụ tai nghe các cỡ khác nhau (2 cặp)

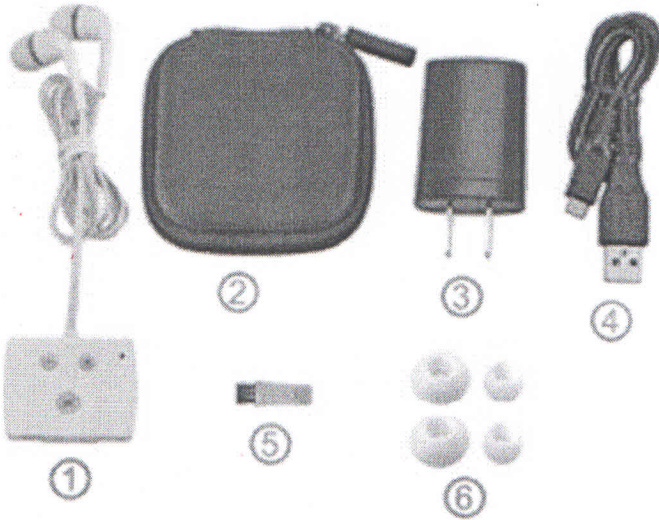

2. Sử dụng

2.1. Đeo và dùng máy

- Đeo nút tai nghe màu đỏ vào tai phải và nút tai màu xanh vào tai trái và nhẹ nhàng cho 2 nút tai nghe vừa khít lỗ tai.
- Bật máy và điều chỉnh âm lượng (Dùng nút tăng (+)/giảm (-) âm lượng) sao cho phù hợp âm thanh nghe được tốt nhất.

Chú ý: Điều chỉnh âm lượng từ từ sao cho nghe âm thanh rõ nhất. Tránh mở âm lượng quá cao, có thể gây ảnh hưởng không tốt đến tai.

2.2. Sạc pin cho máy

- Dùng bộ cấp điện và dây USB đi theo máy để sạc khoảng 3h liên tục. Đèn LED tín hiệu Đỏ là đang sạc, đèn tắt là pin đã đầy.
- Khi pin đầy thì có thể dùng máy liên tục trong khoảng 15h.

Chú ý: Chỉ được sạc máy bằng bộ cấp nguồn và dây USB kèm theo máy. Nếu dùng bộ cấp nguồn khác có thể gây ra hỏng máy và nhà sản xuất sẽ từ chối bảo hành trong những trường hợp này.

2.3. Kết nối với điện thoại bằng Bluetooth.

- Bật Bluetooth trên máy DP-6K5B bằng cách giữ nút M trong khoảng 3s. (Đèn LED sẽ nhấp nháy xanh đỏ là chức năng Bluetooth đã bật)
- Bật chức năng Bluetooth trên điện thoại và kết nối với máy DP-6K53. Khi kết nối thành công trên điện thoại sẽ hiện ra thiết bị có tên: Mimitakara DP-6K53.

3. CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

- Trước khi dùng máy, phải vệ sinh tai thật sạch sẽ.
- Nếu bạn thấy khó chịu trong khi sử dụng máy trợ thính thì hãy tham khảo ý kiến của bác sỹ ngay
- Đặt máy trợ thính nhẹ nhàng vào tai sao cho thoải mái nhất. Chú ý là không buộc máy trợ thính vào tai.
- Để đảm bảo vệ sinh cá nhân thì bạn không được cho người khác sử dụng chung máy trợ thính của mình
- Tránh xa tầm tay trẻ em
- Không đeo máy trợ thính trên tai khi đang chơi thể thao hay tập thể dục
- Không đeo máy trợ thính khi rửa mặt hoặc ở ngoài trời mưa (đảm bảo khô ráo).
- Không đeo máy khi ngủ
- Bỏ máy trợ thính khỏi tai khi sử dụng điện thoại.
- Tắt máy trợ thính khi không sử dụng và đặt trong hộp bảo vệ để đảm bảo an toàn cho máy.
- Tham khảo ý kiến của bác sỹ khi bạn đang sử dụng các dụng cụ y tế hỗ trợ khác như máy tạo nhịp tim, ...
- Bảo quản máy ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp của mặt trời và những nơi có độ ẩm cao

4. Bảo quản máy

- Sau khi dùng máy xong, vệ sinh máy sạch sẽ trước khi cất. Dùng chổi vệ sinh (đi kèm) lau sạch ráy tai bám trên nụ tai nghe (nếu có)
- Nhiệt độ bảo quản: -10°C – 60°C
- Độ ẩm: 30-85%

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI HẠ LONG

1118, Nơ 4B, Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024 3864 6392 Fax: 024 3864 6390

Email: contact@halongsky.com Web: <http://www.halongsky.com.vn>