

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vương
Địa chỉ: Số 35, Tổ 14, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà nội

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ĐÈN MÔ TREO TRẦN HAI NHÁNH AUA3
(DÒNG ĐÈN MÔ AURORA ASTRO)

(Bao gồm 2 chóa đèn mô AUA 3)

Mã hàng hóa : AUA3
Hãng sản xuất : Dai-ichi/Skytron - Mỹ
Nước sản xuất : Nhật bản

1. Kiểm tra trước khi khởi động.



CHÚ Ý

Luôn kiểm tra trước khi sử dụng để đảm bảo tính năng an toàn và chính xác. Những bộ phận nào lỗi, phải tháo ra sửa chữa hoặc thay thế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Kiểm tra khả năng phát sáng của đèn.
- Kiểm tra tình trạng vỡ, hỏng bóng. Tránh sử dụng nếu có hiện tượng hư hại.
- Kiểm tra chức năng hoạt động của điều khiển cường độ trên đầu đèn.
- Kiểm tra tính năng di chuyển, xoay của các khớp. Đảm bảo đèn được vận hành và hoạt động tốt trong khi chuyển động..

2. Vận hành

2.1. Lắp tay điều khiển vô trùng

a.

Lắp tay điều khiển vào đai ốc ở giữa đầu đèn, sau đó đẩy, vặn, và kéo cho đến khi khoá chặt (nghe thấy tiếng “cách”)



Chú ý:


Khi thực hiện lắp tay điều khiển vô trùng, người thực hiện cần phải khử trùng trước khi thực hiện. Người chưa khử trùng không được phép tiếp xúc với tay điều khiển này.

CHÚ Ý:

Đảm bảo tay điều khiển được lắp đúng cách trước khi sử dụng đèn mổ, nếu không sẽ gây ra thương tích cho người sử dụng và bệnh nhân.

Tay điều khiển này có thể tháo ra để vệ sinh và tiệt trùng.

- Tháo tay điều khiển: (A) Đẩy công tắc A. (B) Kéo tay điều khiển ra. .

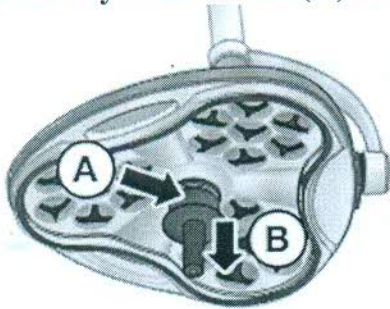

CHÚ Ý:

Tay điều khiển vô trùng có thể bị hỏng. Luôn kiểm tra và đảm bảo tình trạng hoạt động tốt, đảm bảo an toàn trong khi vận hành đèn mổ.

- b. Yêu cầu về vị trí đầu đèn. Cách cầm tay điều khiển để điều chỉnh đầu đèn. (Figure 5).



Chú ý:



Để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, không được chạm đồng thời vào bệnh nhân và bất cứ bộ phận nào của hệ thống.

Không nhìn trực diện vào đèn mổ hoặc đặt vật có độ phản chiếu cao vào đường đi của ánh sáng.

2.2. Điều chỉnh cường độ đầu đèn.

Sử dụng công tắc bật / tắt cường độ ở bên cạnh đầu đèn, hoặc ở tay điều khiển trung tâm đầu đèn để BẬT và điều chỉnh cường độ sáng mong muốn. Đầu đèn có 4 mức cường độ cài đặt. Từ mức OFF (Tắt), bước bấm đầu tiên là đèn sẽ bật ở cường độ cao nhất. Mỗi một lần bấm nút sẽ giảm một mức cường độ. Bấm lại vào công tắc bên cạnh lần nữa tại mức cường độ thấp nhất để tắt

đèn. Nếu sử dụng công tắc bấm ở tay điều khiển ở trung tâm đầu đèn, bấm và giữ trong 5 giây, để TẮT đèn.




Lighthouse intensity control button on positioning handle



3. Kết thúc vận hành



Khi không muốn sử dụng đèn nữa, thực hiện các bước sau:
steps:

3.1. Tắt đèn bằng công tắc điều khiển bên cạnh đầu đèn cho đến khi đèn tắt hẳn, giữ công tắc điều khiển trung tâm đầu đèn giây.

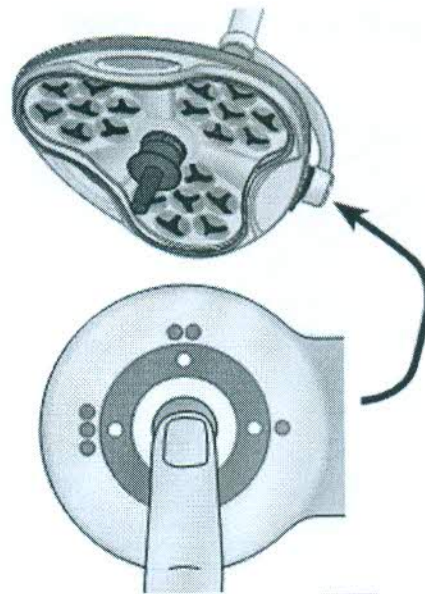


cường độ
hoặc ấn và
trong 5

3.2. Xoay đầu đèn về vị trí quay xuống.

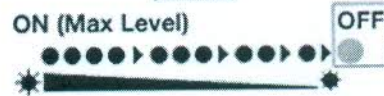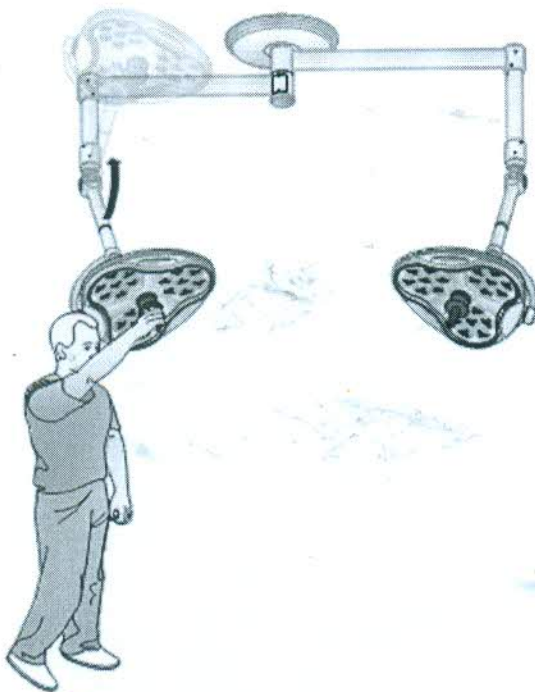

1017
CƠ
HẠCH N
THU
HƯN
VAM TU

3.3. Tháo tay điều khiển vô trùng.

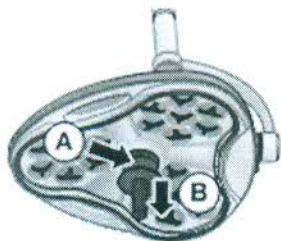

Hà nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018
Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

Trình Hà Thanh

M.S.D.N.: 0107160408