



CÔNG TY CP
THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ
HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & SẢN XUẤT TBYT HÀ NỘI

KIM MÃ – BA ĐÌNH – HÀ NỘI Tel:02435766996 – 02436335959
Mail: thietbivenhvien106e9@gmail.com



TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TCCS 14:2018/MEF

- Tên SP, hàng hoá: **NẠNG TẬP ĐI**
- Kiểu, loại, mã số:
- Nhãn hiệu hàng hóa, mã ký hiệu sản phẩm: N-01



MỤC LỤC

ĐIỀU	NỘI DUNG	TRANG
Điều 1	Phạm vi áp dụng	3
Điều 2	Căn cứ pháp lý	3
Điều 3	Hình dáng và kích thước cơ bản	3
Điều 4	Vật liệu	4
Điều 5	Yêu cầu kỹ thuật	4
Điều 6	Phương pháp thử	5
Điều 7	Ghi nhãn và bao gói	6

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

Điều 1: Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về thông số kỹ thuật và các yêu cầu chung áp dụng cho dòng sản phẩm **Nạng tập đi** do CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI sản xuất

Điều 2: Căn cứ pháp lý

- Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007
- Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006
- Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2011

Điều 3: Hình dáng và kích thước cơ bản

- Hình dáng của sản phẩm được minh họa theo một số hình dưới đây:

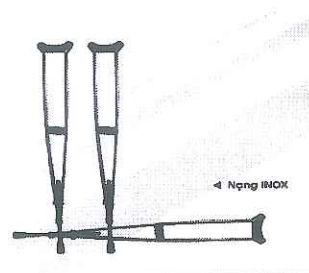

- Kích thước cơ bản:

Chỉ tiêu	Không nhỏ hơn	Không lớn hơn
Kích thước bao ngoài(mm)		
- Rộng (R)		
- Dài (D)		
- Cao (C)	1400	1600

Điều 4: Vật liệu

Sản phẩm không chứa những vật liệu nguy hại tới cơ thể con người, cụ thể như sau:

- Nạng được làm từ thép không gỉ, gỗ, hợp kim nhôm

Tất cả các nguyên vật liệu đều được kiểm tra đầu vào trước khi đưa vào sản xuất

Điều 5: Yêu cầu kỹ thuật

- Dễ vệ sinh, khử trùng, thuận lợi cho chăm sóc bệnh nhân.
- Nặng đáp ứng được các yêu cầu sử dụng dễ lấy, dễ thấy trong cấp phát
- Kết cấu vững chắc
- Tiếp đất tốt bằng chân vững vàng.
- Có thể điều chỉnh chiều cao gậy bằng nút bấm.
- Khóa chắc chắn không bị kẹt.
- Các mối ghép kín khít, khe hở đều nhau
- Các góc ke vuông, không bị xiên lệch

5.1. Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra ngoại quan các hạng mục dưới đây:

- Kiểm tra bên ngoài nhãn bóng, không xù xì, không rách.
- Kiểm tra màu sắc, bề mặt sản phẩm có độ bóng đều, không có vết
- Phương pháp kiểm tra: Xác nhận bằng quan sát

5.2. Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra kỹ thuật những hạng mục sau đây:

- Phương pháp kiểm tra: Xác nhận bằng mắt thường và cảm quan

5.3. Kiểm tra đo lường

Kiểm tra đo lường những hạng mục sau đây:

- Đo kích thước phủ bì bên ngoài, các chi tiết bên trong
- Phương pháp kiểm tra: Dùng các thiết bị đo thông dụng như: thước cặp, thước lá, thước dây, ke góc...

Điều 6. Phương pháp thử

- Thử tải trọng:
 - + Dùng tải thử 100 kg

+ Kết quả được coi là đạt nếu các bộ phận không hư hỏng, Nặng không bị biến dạng.

Điều 7. Ghi nhãn và bao gói

- Nhãn sản phẩm được gắn tại nơi dễ nhận biết, nội dung nhãn theo quy định hiện hành.
- Nặng được bao gói bằng bì các tông hoặc màng nilon
- Trên nhãn và hộp đóng gói có đầy đủ các thông tin sau:
 - Tên sản phẩm: **NẶNG TẬP ĐI**
 - Số lưu hành;
 - Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**
 - Số đăng ký:
 - Số máy:
 - Tiêu chuẩn áp dụng: **TCCS 14:2018/MEF**
 - Ngày tháng xuất xưởng

