

# TÀI LIỆU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY XOA BÓP TOÀN THÂN

MODEL : 01M7

HÃNG SẢN XUẤT : ZERO ONE-M CO.,LTD



**Đại diện Công ty**



**GIÁM ĐỐC**  
*Dinh Đức Duy*

## 1. Giới thiệu các bộ phận máy xoa bóp toàn thân:



STT	Tên	Chức năng
1	Thân máy	Điều chỉnh các chế độ
2	Dây linh hoạt	Kết nối thân máy với đầu rung
3	Giá đỡ đồ	Đỡ các phụ kiện của máy
4	Đế xe đẩy	Giữ cân bằng khi di chuyển
5	Bánh xe	Di chuyển máy dễ dàng
6	Các phụ kiện	Kết nối với đầu rung, dùng với từng bộ phận trên cơ thể để massage.
7	Đầu rung	Kết nối với các phụ kiện
8	Đai	Giữ ống mềm
9	Thân xe đẩy	Điều chỉnh chiều cao của giá đỡ máy

a) 7 đầu nối với thiết bị rung:



b) Thân máy chính:



c) Xe đẩy:



d) Dây nguồn:



## 2. Cách lắp ráp máy:



①



②



③





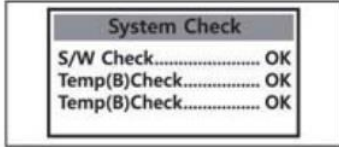
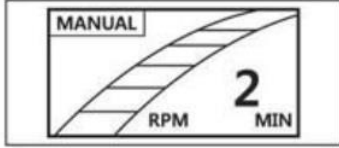
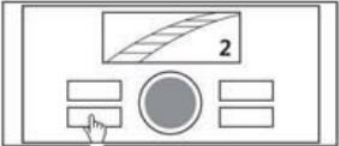
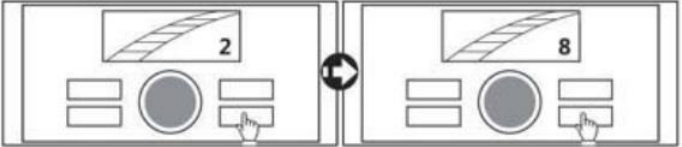
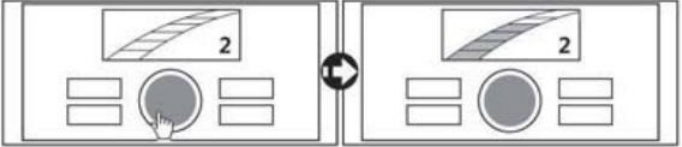

④



⑤


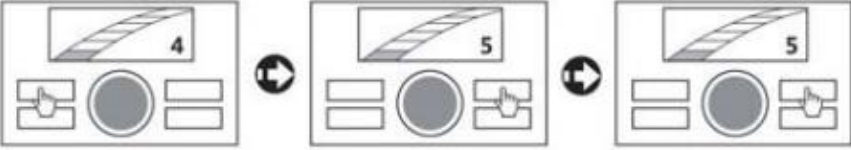

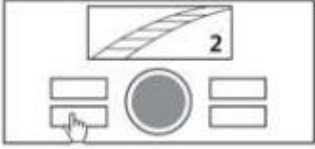


### 3. Hướng dẫn sử dụng:

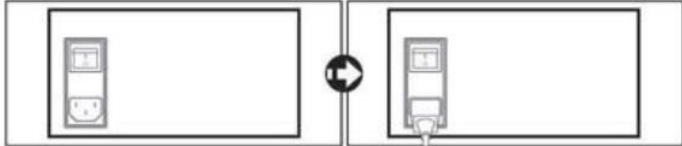1. <b>Cắm Dây Nguồn Vào Nguồn Điện</b>	
2. <b>Bật Công Tác Nguồn</b>	 <div data-bbox="1010 521 1358 667">Power Switch</div>
3. <b>Máy tự động kiểm tra hệ thống</b>	 <div data-bbox="1010 678 1358 824">System Check...</div>
4. <b>Chế độ chờ</b>	 <div data-bbox="1010 835 1358 981">"Manua" usage</div>
5. <b>Ấn nút chạy máy : "START/STOP"</b>	 <div data-bbox="1010 992 1358 1137">"Manual" starting</div>
6. <b>Ấn nút điều chỉnh thời gian: "TIME"</b>	
7. <b>Xoay chiết áp theo chiều kim đồng hồ để tăng cường độ rung</b>	
8. <b>Ấn nút : "START/STOP" Để dừng lại.</b>	 <div data-bbox="1010 1462 1358 1608">"Manual" starting</div>




## 4. Cài đặt chế độ - MODE (3 chế độ đã được lập trình sẵn trong máy)

### 1. Làm lại các bước từ 1 đến 4 trong phần trên


<p>2. MODE ấn "MODE"</p>		
<p>3. MODE Selection :M1,M2,M3</p>		
<p>4. <b>Ấn Start để chạy máy</b> "STOP/START"</p>		<p><b>Chạy chế độ mode đã chọn</b></p>
<p>5. <b>Ấn Stop</b> "STOP/START"</p>		<p><b>Dừng lại chế độ đang chạy</b></p>
<p>6. MODE</p>	<p>MODE 1 1st(1 min)⇒3rd (1min)⇒5th(1min)⇒7th(1min)          MODE 2 1st (1min)⇒3rd(2min)⇒5th(1min)⇒7th(1min)          MODE 3 1st(1min)⇒3rd(1min)⇒5th(1min)⇒7th(2min)</p>	



5. Ứng dụng của các đầu massage trên cơ thể con người (phần cơ được in đậm)

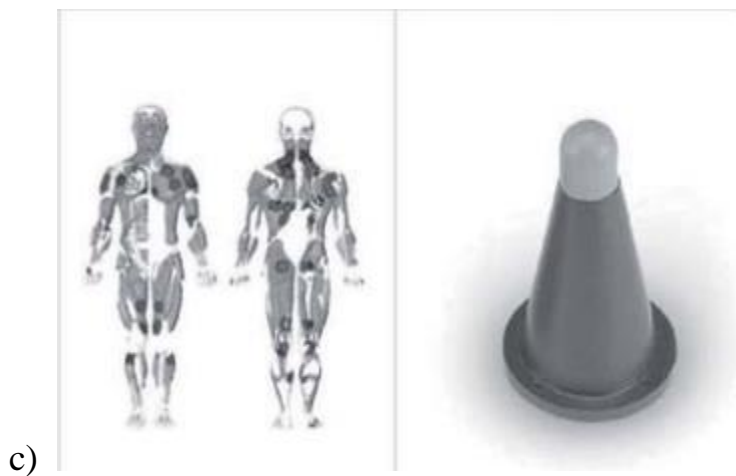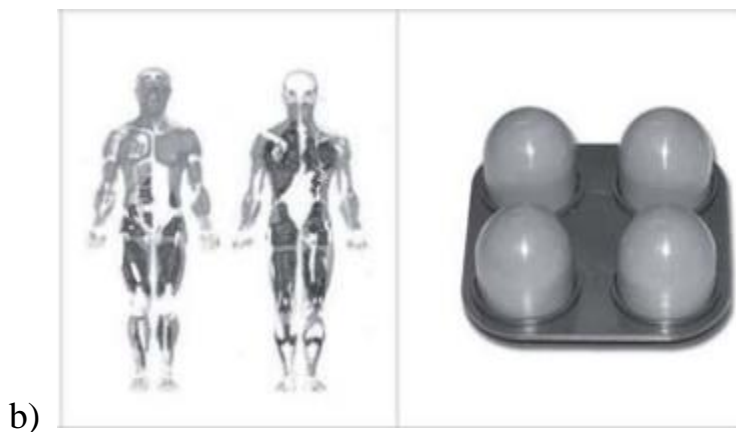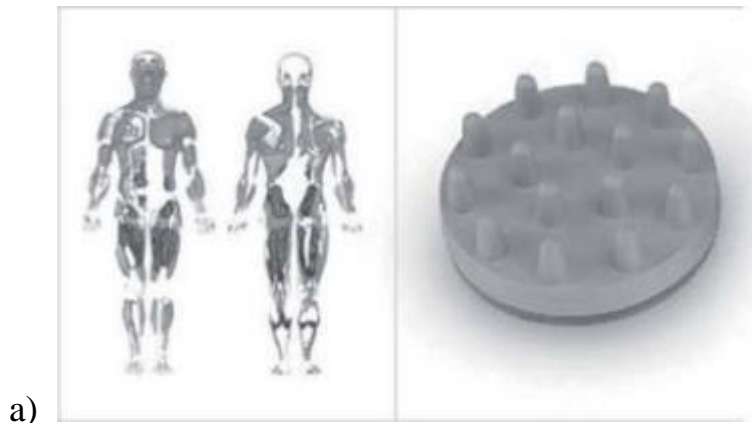


d)

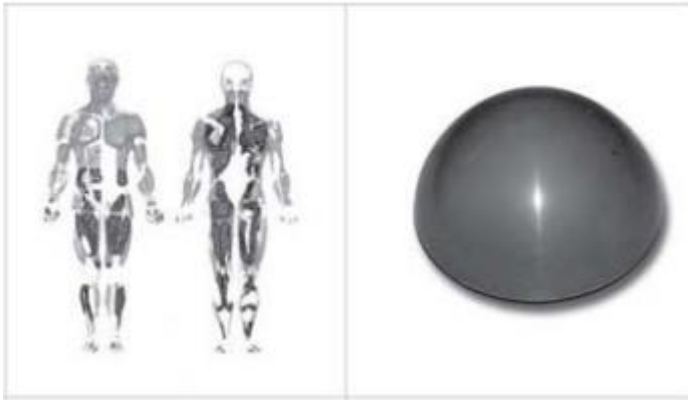

e)



f)

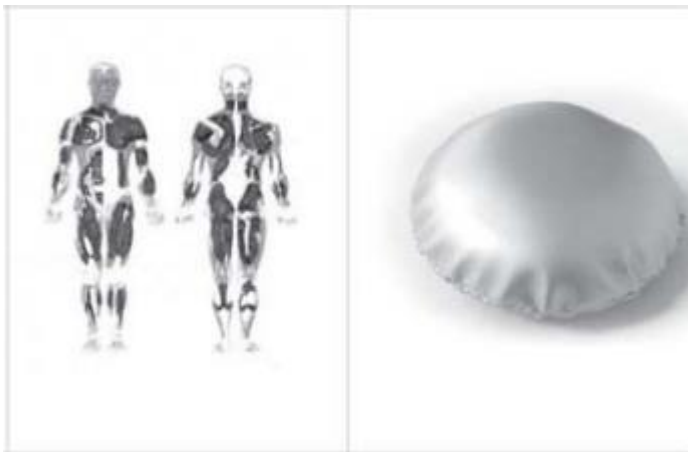

g)

