

STT	Mã ICC	Tên sản phẩm
#1	401534	<i>SUR-FIT Natura</i> [®] <i>Urostomy Pouch</i>

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đọc hướng dẫn sử dụng khi dùng.

Chỉ sử dụng một lần.

Đề thu nước tiểu thoát ra từ lỗ mở đường tiểu ra da.

THẬN TRỌNG: Không có.

CÁCH DÙNG

Gắn túi vào đế đã dán trên lỗ mở đường tiểu ra da bằng vòng gắn.

Khi nước tiểu chiếm 1/3 túi, mở khóa xả nước tiểu, rồi đóng khóa lại.

BỎ TÚI

Bỏ túi sau khi sử dụng xong theo quy định quản lý rác thải y tế của địa phương.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Nhiệt độ bảo quản

Giữ nơi khô ráo.

Tránh ẩm.

Số lô sản xuất



Ngày hết hạn sử dụng

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng xem tại: www.ConvaTec.com

