

STT	Mã ICC	Tên sản phẩm
#1	401535	<i>SUR-FIT Natura® Urostomy Pouch</i>

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đọc hướng dẫn sử dụng khi dùng.

Chỉ sử dụng một lần.

Đề thu nước tiểu thoát ra từ lỗ mở đường tiểu ra da.

**THẬN TRỌNG:** Không có.

### CÁCH DÙNG

Gắn túi vào đế đã dán trên lỗ mở đường tiểu ra da bằng vòng gắn.

Khi nước tiểu chiếm 1/3 túi, mở khóa xả nước tiểu, rồi đóng khóa lại.

### BỎ TÚI

Bỏ túi sau khi sử dụng xong theo quy định quản lý rác thải y tế của địa phương.

### ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Nhiệt độ bảo quản

Giữ nơi khô ráo.

Tránh ẩm.

Số lô sản xuất



*Nguyễn Văn Nguyễn*



Ngày hết hạn sử dụng

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng xem tại: [www.ConvaTec.com](http://www.ConvaTec.com)

